

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM

neodisher®IR

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG

Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, Đức

Dung dịch đánh tan gỉ dụng cụ y tế neodisher®IR

CHỈ ĐỊNH: Chỉ sử dụng trên dụng cụ phẫu thuật làm từ thép chrome hoặc thép chrome nickel

THÀNH PHẦN: < 5% chất hoạt động bề mặt không ion; >30% phosphates

ĐẶC TÍNH: Tẩy rửa, làm sạch đánh tan các vết rỉ, xỉn màu, cặn vô cơ trên bề mặt dụng cụ y tế, bằng cách ngâm thủ công trong bồn rửa hoặc máy rửa sóng siêu âm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

• Rửa thủ công trong bồn rửa: Ngâm dụng cụ trong dung dịch neodisher IR 1-10% (10-100 ml/l) trong thời gian 1 tiếng (có thể kéo dài thời gian ngâm lên 4 tiếng) sau đó xả sạch với nước, các vết cặn gỉ sẽ bị loại bỏ

• Rửa trong máy rửa sóng siêu âm: Ngâm dụng cụ trong dung dịch neodisher IR 1.5-3% (15-35 ml/l) trong 1 – 5 phút tùy theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Đưa dụng cụ ra xả sạch với nước.

Không nên dùng bàn chải để cọ vào bề mặt dụng cụ

KHUYẾN CÁO:

Tham khảo tài liệu về an toàn sản phẩm (Safety data sheet) Nguy cơ cháy nổ, không để bình xịt tiếp xúc với lửa hoặc nguồn nhiệt cao. Tuân thủ hướng dẫn đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

BẢO QUẢN: Sản phẩm cần được lưu trữ trong điều kiện thoáng khí, nhiệt độ không dưới -15oC

HSD & NSX: Xem trên nhãn chính của sản phẩm.

SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH:

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI:

Công Ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Long.

Địa chỉ: B16, TT8 Khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Điện thoại: (024) 2264 5566



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Long