

HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG

CÁNG HƠI CẤP CỨU

Model: YDC-6A1

Hãng sản xuất: JIANGSU RIXIN

Nước sản xuất: Trung Quốc

1. Đặt nệm ra một mặt phẳng trải đều căng



2. Đặt bệnh nhân nằm thẳng trên cáng và cố định bằng dây đai



3. Gắn nối bơm hơi vào van cáng và bơm căng



4 Di chuyển bệnh nhân bằng cách cầm vào đai ở hai bên cánh (Lưu ý chọn vị trí giữ thăng bằng cho bệnh nhân)



4. Sau khi sử dụng xả hơi bằng cách mở van và gấp gọn vào túi

