
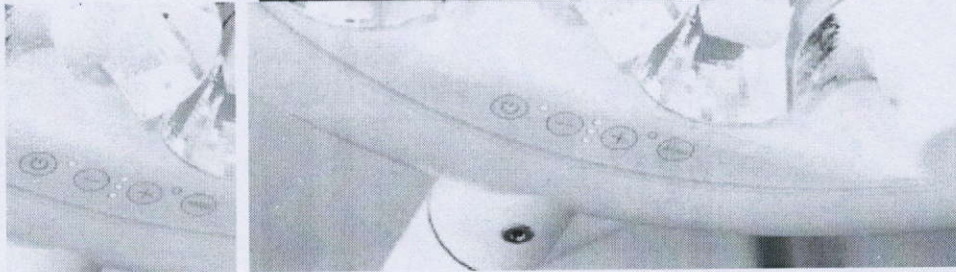


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN PHẪU THUẬT

HÃNG SẢN XUẤT: NEXOR/ ĐỨC

Model: Nova.light 200; Nova.light 300; Nova.light 350;
Nova.light 450; Nova.light 500; Nova.light 600; Nova.light
700; Nova.light 800

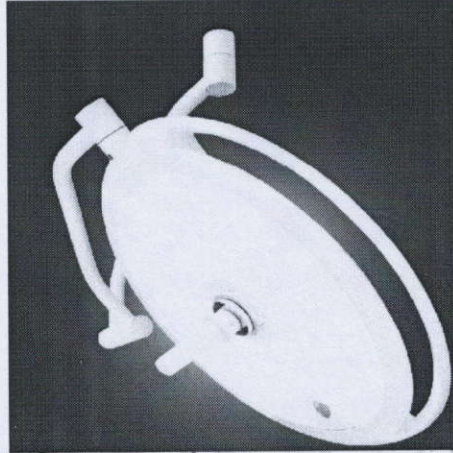

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH:

1- Kết nối nguồn điện AC 220, 50-60 Hz

- **Bật đèn:** Ấn công tắc nguồn. Không nên nhìn trực tiếp vào chóa đèn
- **Tắt đèn:** Ấn công tắc nguồn. Chú ý trước khi tắt đèn, trong phòng phải còn đủ ánh sáng để di chuyển an toàn.

2- **Điều chỉnh cường độ sáng:** Ấn phím tăng/ giảm để thay đổi cường độ sáng cho phù hợp.

Chú ý: Không sử dụng đèn khi ánh sáng chớp tắt liên tục hoặc số lượng LED sáng không đủ. Báo ngay cho nhân viên kỹ thuật.

3- Sử dụng tay nắm để điều chỉnh độ cao chóa đèn phù hợp cho phẫu thuật.



Dặng Thanh Huy
GIÁM ĐỐC