

SAFE GLOVE - DPQ

GĂNG TAY Y TẾ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Không tiết trùng
- Dùng một lần
- Thuận cả hai tay
- Màu cao su trắng tự nhiên

Găng có độ bền, dai cao và mềm mại giúp cho người đeo thao tác dễ dàng.

NGUYÊN LIỆU

Mủ cao su thiên nhiên

NHÀ SẢN XUẤT

Tan Sin Lian Industries SDN BHD

NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Sản xuất tại Malaysia

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng trong các hoạt động y khoa như khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân, nha khoa... giúp ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh trong quá trình tiếp xúc giữa nhân viên y tế và người bệnh.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Các đặc tính	SAFE GLOVE	Tiêu chuẩn ASTM D3578	Tiêu chuẩn EN 455
Chiều dài (mm)	Min 240	Min 220 (XS, S) Min 230 (M,L)	Min 240
Bề rộng (mm)			
- XS	76 \pm 3	70 \pm 10	\leq 80
- S	84 \pm 3	80 \pm 10	80 \pm 10
- M	94 \pm 3	95 \pm 10	95 \pm 10
- L	105 \pm 3	111 \pm 10	110 \pm 10
- XL	113 \pm 3	N/A	\geq 110
Độ dày (mm)			
- Phần ngón	Min 0.08	Min 0.08	N/A
- Phần bàn tay	Min 0.08	Min 0.08	N/A

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng, rửa tay sạch sẽ bằng nước sạch, dung dịch tẩy rửa hoặc xà phòng. Lau khô tay để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn hay dịch bệnh. Xé các phần răng cưa trên mặt hộp giấy để lấy sản phẩm và sử dụng.

Nhập khẩu và phân phối bởi


CÔNG TY TNHH MTV TM ĐẠI PHÚ QUÝ

Tầng 19, Khu văn phòng tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao Quận 1, Tp.HCM

ĐT: 028- 7306 0450 email: manager@daiphuquycoltd.com



Lê Hồng Phong

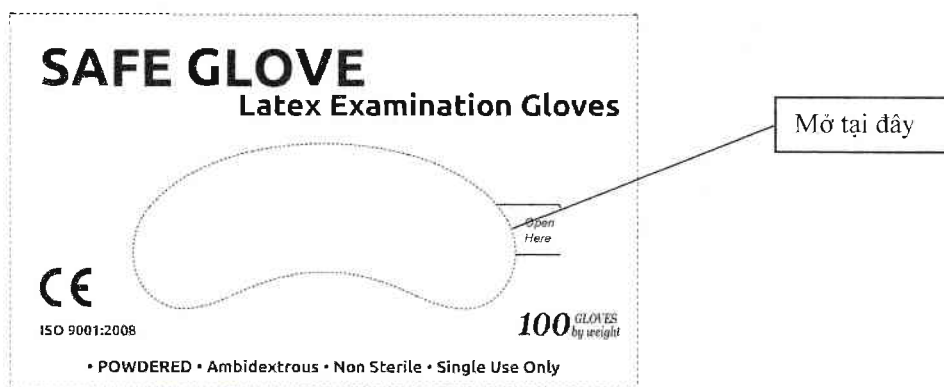

CẢNH BÁO VÀ LƯU Ý








Sản phẩm không tiệt trùng, không sử dụng trong các thủ thuật y tế xâm nhập chuyên sâu. Sản phẩm được sản xuất từ cao su thiên nhiên có chứa protein, có thể gây dị ứng da trong một số trường hợp. Khi phát hiện tay có nổi mẩn đỏ kèm theo cảm giác ngứa, ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ. Người sử dụng có thể tìm các biện pháp thay thế như sử dụng găng tay nitril, găng tay polyisoprene nếu dị ứng với protein của cao su thiên nhiên.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

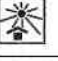Bảo quản ở nhiệt độ phòng

CÁC BIỂU TƯỢNG TRÊN BAO BÌ

	Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 ⁰ C
	Sử dụng 1 lần
	Tránh ánh sáng trực tiếp
	Giữ nơi khô ráo
	Hạn sử dụng
	Nhà sản xuất
	Sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu

ĐÓNG GÓI: 100 cái/ Hộp; 10 hộp/ thùng

HẠN SỬ DỤNG

05 năm kể từ ngày sản xuất.

Nhập khẩu và phân phối bởi

CÔNG TY TNHH MTV TM ĐẠI PHÚ QUÝ

Tầng 19, Khu văn phòng tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao Quận 1, Tp.HCM

ĐT: 028- 7306 0450 email: manager@daiphuquycoltd.com