

CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL

Số 172 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân  
Phú, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Tp.HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2020

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế : Máy trộn “DHEF”Alginate Mixer (Non-Sterile)

Model: Blendex

Tên cơ sở sản xuất: DHEF INC. HIS-CHIH FACTORY

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 15F,NO.106,SEC.1, HSIN-TAI WU RD., HIS CHIH DIST.,  
NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C

1. Đo lường lượng Alginate và nước bỏ vào cốc trộn.
2. Dùng que khuấy khuấy đều cốc khoảng 2 giây để cho Alginate ướt nước.
3. Đặt cốc vào trong bồn trộn, đóng nắp máy lại.
4. Chọn thời gian thích hợp, sau đó nhấn nút Start/Stop để bắt đầu chu trình.
5. Khi máy ngưng trộn thì mở nắp máy ra, lấy hỗn hợp Alginate ra ngoài

Thời gian trộn:

- 1 muỗng : 8 giây
- 2 muỗng : 10 giây
- 3 muỗng : 12 giây



*Dặng Thị Trà My*  
TỔNG GIÁM ĐỐC