

## Tóm tắt hướng dẫn sử dụng: Nasaleze PM Shield

- Sử dụng Nasaleze PM Shield trước khi đi vào khu vực có khả năng bị ô nhiễm như một cách phòng ngừa để bảo vệ mũi của bạn khỏi các chất dạng hạt. Chất dạng hạt có thể được hình thành từ nhiều hóa chất khác nhau. Không thể nhìn thấy, ngửi hoặc nếm chất dạng hạt - nhưng những hạt này, đặc biệt là những hạt nhỏ hơn (PM10 trở xuống), có thể rất có hại cho cơ thể con người
- Nasaleze PM Shield thích hợp cho người lớn, vận động viên, phụ nữ có thai và cho con bú và trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên.
- Xenlulo biến thành một chất gel trong mũi để tạo ra một hàng rào ngăn cản, bảo vệ và phòng ngừa các chất dạng hạt. Nasaleze PM Shield chứa hương chanh tạo mùi thơm và cảm giác sạch sẽ khi ở trong môi trường ô nhiễm.
- Cách sử dụng Nasaleze PM Shield  
Bước 1 – Xì mũi.  
Bước 2 – Tháo nắp và lắc lắc lọ.  
Bước 3 – Xịt thử một lần để xác định áp suất cần thiết cho liều lượng lý tưởng, nếu thấy lọ quá cứng không thể bóp bằng một tay thì hãy sử dụng cả hai tay (sau khi đã quen dùng)  
Bước 4 – Cho miệng lọ vào trong mũi và xịt từ 1 đến 2 lần vào mỗi lỗ mũi. Hít nhẹ trong khi xịt nhưng không hít sâu  
Bước 5 – Xịt lại sau mỗi lần xì mũi.
- Nếu Nasaleze PM Shield Blocker không làm dịu các triệu chứng của bạn  
Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ về các biện pháp khác bạn có thể áp dụng để bảo vệ khỏi ô nhiễm.
- Không rửa bằng nước hoặc chất lỏng khác vì có thể làm tắc lọ. Không sử dụng nếu nắp bị hỏng. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, hoặc trong khoảng từ 5°C đến 30°C  
Hạn sử dụng 6 tháng kể từ lúc mở nắp.  
Không bảo quản đông lạnh.
- Chống chỉ định  
Không phù hợp với trẻ dưới 18 tháng tuổi. Không sử dụng nếu bạn nhạy cảm với xenlulo hoặc chanh. Tránh tiếp xúc với mắt. Tránh tiếp xúc với vết thương hở.



## Tóm tắt hướng dẫn sử dụng: Nasaleze Children's Allergy Blocker

- Nên sử dụng Nasaleze Children's Allergy Blocker trước khi tiếp xúc với các chất gây dị ứng để ngăn chúng rơi xuống màng mũi và bắt đầu gây phản ứng dị ứng.
- Nasaleze Children's Allergy Blocker được chứng minh lâm sàng là có tác dụng hiệu quả ở những người bị viêm mũi dị ứng mức độ nhẹ đến trung bình.
- Với tác dụng phòng ngừa, Nasaleze Children's Allergy Blocker ngăn chặn phản ứng dị ứng trước khi các triệu chứng bắt đầu
- Cách sử dụng Nasaleze Children's Allergy Blocker

Bước 1 – Xì mũi.

Bước 2 – Tháo nắp và lắc lắc lọ.

Bước 3 – Xịt thử một lần để xác định áp suất cần thiết cho liều lượng lý tưởng, nếu thấy lọ quá cứng không thể bóp bằng một tay thì hãy sử dụng cả hai tay (sau khi đã quen dùng)

Bước 4 – Cho miệng lọ vào trong mũi và xịt từ 1 đến 2 lần vào mỗi lỗ mũi. Hít nhẹ trong khi xịt nhưng không hít sâu

Bước 5 –Xịt lại sau mỗi lần xì mũi.

- Nếu Nasaleze Children's Allergy Blocker không làm dịu các triệu chứng của bạn

Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về loại thuốc bạn có thể dùng để hỗ trợ Nasaleze Allergy Blocker trong quá trình điều trị bệnh sốt mùa hè và dị ứng. Nếu bạn chưa dùng sản phẩm này trước khi có phản ứng dị ứng, hãy đợi phản ứng dị ứng dịu bớt (khoảng 30 phút) sau đó thử lại.

- Cách bảo quản Nasaleze Children's Allergy Blocker

Bảo quản ở nhiệt độ phòng, hoặc trong khoảng từ 4°C đến 30°C. Không bảo quản đông lạnh.

- Chống chỉ định

Không phù hợp với trẻ dưới 18 tháng tuổi. Không sử dụng nếu bạn nhạy cảm với xelulo và/hoặc bạc hà. Tránh tiếp xúc với mắt. Tránh tiếp xúc với vết thương hở



*Man*  
*Lê Thị Hoàng Lan*

## Tóm tắt hướng dẫn sử dụng: Nasaleze Cold & Flu Blocker

- Sử dụng Nasaleze Cold & Flu Blocker trước khi các triệu chứng khởi phát. Nasaleze Cold and Flu Blocker là một sản phẩm điều trị phòng ngừa các virus cảm lạnh và cúm. Nasaleze Cold and Flu Blocker đã được chứng minh lâm sàng là giúp ngăn chặn sự khởi phát của cảm lạnh hoặc cúm hoặc rút ngắn thời gian của bệnh này. Nasaleze Cold and Flu Blocker được chứng minh lâm sàng là có tác dụng hiệu quả ở người lớn và trẻ em từ 3 tuổi. Nếu các triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm đã bắt đầu trước khi dùng Nasaleze Cold and Flu Blocker, bạn vẫn có thể sử dụng Nasaleze để rút ngắn thời gian điều trị. Nếu cần sử dụng đồng thời một loại thuốc xịt mũi khác, thì nên xịt lại Nasaleze Cold & Flu Blocker để hàng rào được tạo ra không bị xáo trộn. Nasaleze Cold & Flu Blocker có thể được sử dụng cùng với thuốc, như một phần của chiến lược trị liệu kết hợp trong phòng ngừa và điều trị cảm lạnh và cúm.
- Nasaleze Cold & Flu Blocker thích hợp cho người lớn, vận động viên, phụ nữ có thai và cho con bú và trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Để xa tầm tay của trẻ nhỏ. Nasaleze Cold & Flu Blocker không chứa bất kỳ loại thuốc hay dược phẩm nào. Nasaleze Cold & Flu Blocker đảm bảo an toàn. Nasaleze Cold & Flu Blocker không gây buồn ngủ.
- Con đường nhiễm bệnh cảm lạnh và cúm phổ biến nhất là qua mũi. Virus cảm lạnh và cúm xâm nhập vào mũi và bám vào niêm mạc mũi, tại đây chúng sinh sôi và lây lan. Quá trình này gây ra các triệu chứng, chẳng hạn như nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, đau họng, đau đầu và ho. Trong giai đoạn đầu của bệnh, bạn thường không thể phân biệt giữa cảm lạnh thông thường và cúm. Cúm là một bệnh có nghiêm trọng; cần có sự chẩn đoán của bác sĩ.
- Cách sử dụng Nasaleze Cold and Flu Blocker  
Bước 1 – Xì mũi.  
Bước 2 – Tháo nắp và lắc lắc lọ.  
Bước 3 – Xịt thử một lần để xác định áp suất cần thiết cho liều lượng lý tưởng, nếu thấy lọ quá cứng không thể bóp bằng một tay thì hãy sử dụng cả hai tay (sau khi đã quen dùng)  
Bước 4 – Cho miệng lọ vào trong mũi và xịt từ 1 đến 2 lần vào mỗi lỗ mũi. Hít nhẹ trong khi xịt nhưng không hít sâu  
Bước 5 – Xịt lại sau mỗi lần xì mũi.
- Nếu Nasaleze Cold & Flu Blocker không làm dịu các triệu chứng của bạn  
Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về loại thuốc bạn có thể dùng để hỗ trợ Nasaleze Cold & Flu Blocker trong quá trình điều trị cảm lạnh và cúm.
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng, hoặc trong khoảng từ 4°C đến 30°C. Không bảo quản đông lạnh.
- Không phù hợp với trẻ dưới 3 tuổi. Không sử dụng nếu bạn nhạy cảm với xenlulo, tòi hoặc bạc hà. Tránh tiếp xúc với mắt. Tránh tiếp xúc với vết thương hở.



## Tóm tắt hướng dẫn sử dụng: Nasaleze Allergy Blocker

- Nên sử dụng Nasaleze Allergy Blocker trước khi tiếp xúc với các chất gây dị ứng để ngăn chúng rơi xuống màng mũi và bắt đầu gây phản ứng dị ứng. Nasaleze Allergy Blocker được chứng minh lâm sàng là có tác dụng hiệu quả ở những người bị viêm mũi dị ứng mức độ nhẹ đến trung bình. Với tác dụng phòng ngừa, Nasaleze Allergy Blocker ngăn chặn phản ứng dị ứng trước khi các triệu chứng bắt đầu.
- Cách sử dụng Nasaleze Allergy Blocker  
Bước 1 – Xì mũi.  
Bước 2 – Tháo nắp và lắc lắc lọ.  
Bước 3 – Xịt thử một lần để xác định áp suất cần thiết cho liều lượng lý tưởng, nếu thấy lọ quá cứng không thể bóp bằng một tay thì hãy sử dụng cả hai tay (sau khi đã quen dùng)  
Bước 4 – Cho miệng lọ vào trong mũi và xịt từ 1 đến 2 lần vào mỗi lỗ mũi. Hít nhẹ trong khi xịt nhưng không hít sâu  
Bước 5 – Xịt lại sau mỗi lần xì mũi.
- Nếu Nasaleze Allergy Blocker không làm dịu các triệu chứng của bạn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về loại thuốc bạn có thể dùng để hỗ trợ Nasaleze Allergy Blocker trong quá trình điều trị bệnh sốt mùa hè và dị ứng. Nếu bạn chưa dùng sản phẩm này trước khi có phản ứng dị ứng, hãy đợi phản ứng dị ứng dịu bớt (khoảng 30 phút) sau đó thử lại.
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng, hoặc trong khoảng từ 4°C đến 30°C. Không bảo quản đông lạnh.
- Không phù hợp với trẻ dưới 18 tháng tuổi. Không sử dụng nếu bạn nhạy cảm với xenlulo và/hoặc bạc hà. Tránh tiếp xúc với mắt. Tránh tiếp xúc với vết thương hở.



## Tóm tắt hướng dẫn sử dụng: Nasaleze Travel

- Để phòng chống virus trong không khí, nên sử dụng Nasaleze Travel trước khi tiếp xúc với môi trường có nguy cơ nhiễm virus cao. Nếu đi lại cả ngày, nên dùng Nasaleze Travel 2 đến 3 lần trong ngày.
- Nasaleze Travel thích hợp cho người lớn, vận động viên, phụ nữ có thai và cho con bú và trẻ em từ 3 tuổi trở lên.
- Nasaleze Travel là loại sản phẩm xịt mũi tạo ra hàng rào để che chắn, bảo vệ và khử các virus và vi trùng trong không khí.
- Cách sử dụng Nasaleze Travel  
Bước 1 – Xì mũi.  
Bước 2 – Tháo nắp và lắc lắc lọ.  
Bước 3 – Xịt thử một lần để xác định áp suất cần thiết cho liều lượng lý tưởng, nếu thấy lọ quá cứng không thể bóp bằng một tay thì hãy sử dụng cả hai tay (sau khi đã quen dùng)  
Bước 4 – Cho miệng lọ vào trong mũi và xịt từ 1 đến 2 lần vào mỗi lỗ mũi. Hít nhẹ trong khi xịt nhưng không hít sâu  
Bước 5 – Xịt lại sau mỗi lần xì mũi.
- Nếu Nasaleze Travel không làm dịu các triệu chứng của bạn  
Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về loại thuốc bạn có thể dùng để hỗ trợ Nasaleze Travel Shield trong quá trình điều trị cảm lạnh và cúm.
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng, hoặc trong khoảng từ 5°C đến 30°C. Không bảo quản đông lạnh.
- Chống chỉ định  
Không phù hợp với trẻ dưới 3 tuổi. Không sử dụng nếu bạn nhạy cảm với xenlulo, bạc hà hoặc tỏi. Tránh tiếp xúc với mắt. Tránh tiếp xúc với vết thương hở.

