


Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: **CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT**

Địa chỉ: 826 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BĂNG BẢO VỆ MẮT TRẺ SƠ SINH KHI ĐIỀU TRỊ BỆNH VÀNG DA

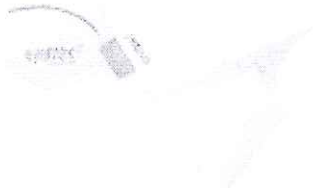

Mục đích sử dụng: Miếng đệm bảo vệ mắt khi điều trị bằng phương pháp ánh sáng được thiết kế đặc biệt được thiết kế để tránh ánh sáng rò rỉ.

Lưu ý:

- Sử dụng ngay sau khi mở bao bì.
- Sản phẩm chỉ dùng cho 01 bệnh nhân trong 01 đợt điều trị.

Mô tả:

- Băng mắt không mũ
- Thiết kế 01 mảnh, có vỏ bọc có 02 điểm gắn kết có thể điều chỉnh độ lặp : điều này ngăn ngừa những chuyển động không mong muốn.
- 2 miếng đệm bảo vệ mắt được thiết kế đặc biệt để tránh ánh sáng rò rỉ.
- Có 03 size vòng đầu :
 1. **Regular** : 33 – 38 cm
 2. **Preemie** : 26 – 32 cm
 3. **Micro** : 20 – 25 cm

Sử dụng: Mở bao bì và băng mắt, choàng qua đầu cho vừa vòng đầu, dây còn lại vòng qua gáy, che lỗ tai, gắn lại bằng 02 điểm tiếp nối.



GIÁM ĐỐC
Phạm Nguyễn Thùy Oanh