

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SUN HEALTH

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội,
Việt Nam

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 01:2020/SHS**

**SẢN PHẨM
KHẨU TRANG Y TẾ SUN HEALTH**

Lần 1, năm 2020

1/ Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn, bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển áp dụng cho sản phẩm KHẨU TRANG Y TẾ SUN HEALTH (Mã sản phẩm SHS.01) do CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SUN HEALTH sản xuất.

2/ Yêu cầu kỹ thuật

- Trạng thái: Bề mặt khẩu trang phải sạch sẽ, không còn dấu chỉ xơ vải và không có lỗi ngoại quan. Gồm từ 2 đến 4 lớp với thun đeo được dập chắc chắn tại 4 góc, có thanh nẹp mũi bằng kẽm bọc nhựa.
- Màu sắc: Màu xanh da trời, trắng, xám, đen hoặc theo yêu cầu.
- Mùi : Không mùi.
- Kích thước : 9,5 cm x 17,5 cm hoặc theo kích thước tùy chỉnh.

3. Cấu trúc sản phẩm**Bảng 1: Cấu trúc sản phẩm**

STT	Bộ phận	Yêu cầu
1	Vải không dệt (lớp 1 và lớp 4)	Vải không dệt có nếp gấp, có độ bền cao và không hút nước.
2	Lớp vi lọc (lớp 2)	Lớp vi lọc không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da, có tác dụng lọc mùi, khói bụi, vi sinh vật, ...
3	Lớp vải kháng khuẩn (lớp 3)	Vải lọc kháng khuẩn không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da, có tác dụng lọc mùi, khói bụi, vi sinh vật, ...
4	Thanh nẹp mũi	Bằng kẽm bọc nhựa hoặc nhựa dễ điều chỉnh, tác dụng nẹp khít khẩu trang trên sống mũi.
5	Dây đeo khẩu trang	Dây đeo làm từ vải thun co giãn, đàn hồi tốt, không gây đau cho người sử dụng giúp cho việc đeo, tháo khẩu trang dễ dàng, đảm bảo.

4. Yêu cầu về các chỉ tiêu lý, hóa và giới hạn cho phép các nguyên tố kim loại nặng

Bảng 2: Các chỉ tiêu lý, hóa và giới hạn cho phép các nguyên tố kim loại nặng

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1	Ngoại quan	17,5cm x 9,5cm (± 5cm)	Kiểu dáng, kích thước đồng đều nhau, đảm bảo che kín mũi và miệng, không gây dị ứng cho người sử dụng	Cảm quan
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu ở chế độ thổi khí 30L/min, không nhỏ hơn.	%	90	TCVN 83981:2010
3	Trở lực hô hấp (P ở chế độ thổi khí 30L/min, không lớn hơn.	mmH2O	9	TCVN 83981:2010
4	Giới hạn trường nhìn, không lớn hơn.	%	6	TCVN 3254-1979
5	Khối lượng, không lớn hơn	gam	6	TCVN 83981:2010
6	Hàm lượng Asen (As), không lớn hơn	mg/kg	0,17	TCVN 83981:2010
7	Hàm lượng Chì (Pb), không lớn hơn	mg/kg	1.0	TCVN 83981:2010
8	Hàm lượng Thủy ngân (Hg), không lớn hơn	mg/kg	0,12	TCVN 83981:2010
9	Hàm lượng Antimon (Sb), không lớn hơn	mg/kg	0,1	TCVN 83981:2010
10	Hàm lượng Cadimi (Cd), không lớn hơn	mg/kg	0,1	TCVN 83981:2010

5. Mục đích/Chỉ định sử dụng: Khẩu trang SUN HEALTH được cấu tạo bởi 4 lớp, có tác dụng ngăn khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập. Phòng chống các bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc trong bệnh viện, môi trường công nghiệp độc hại.

Lớp vải lọc khí không thấm nước, thoáng khí không gây dị ứng da.

6. Hướng dẫn sử dụng: Mở khẩu trang, bẻ thanh tựa mũi tạo độ kín. Chụp khẩu trang kín mũi và miệng. Kéo dây chun đeo vòng qua tai.

7. Chống chỉ định: Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

8. Cảnh báo và thận trọng:

- Chỉ sử dụng 1 lần, không tái sử dụng sau khi giặt.
- Không kéo quai khẩu trang quá mạnh để tránh bị giãn lỏng.
- Trường hợp kính mắt có thể bị mờ khi đeo khẩu trang, nên cẩn thận khi đi đường, lái xe.
- Trường hợp bị kích ứng da, ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để kiểm tra.

9. Ghi nhãn: Ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

10. Đóng gói: Sản phẩm được đóng gói 01 cái/ túi ; 20 cái/ túi ; 30 cái/ túi ; 50 cái/ túi hoặc đóng theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm chứa trong hộp giấy và đóng thùng carton.

11. Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm mốc.

12. Hạn dùng: 5 năm kể từ ngày sản xuất

13. Vận chuyển: Phương tiện vận chuyển sản phẩm phải khô, sạch, được che mưa nắng, không có chất độc hại và không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2020
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Chữ viết tay đầy đủ, chức danh)



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Ngọc Cường