

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
KHẨU TRANG Y TẾ SUN HEALTH**

MÔ TẢ:

- Khẩu trang y tế là khẩu trang 04 lớp từ ngoài vào trong: Lớp 1 và lớp 4: Vải không dệt có nếp gấp, có độ bền cao và không hút nước; Lớp 2: Là lớp vi lọc ; Lớp 3: Vải lọc kháng khuẩn không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da, có tác dụng lọc mùi, khói bụi, vi sinh vật.
- Thanh nẹp mũi bằng kẽm bọc nhựa hoặc nhựa dễ điều chỉnh, tác dụng nẹp khít khẩu trang trên sống mũi.
- Dây đeo làm từ vải thun co giãn, đàn hồi tốt, không gây đau cho người sử dụng giúp cho việc đeo, tháo khẩu trang dễ dàng, đảm bảo.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Khẩu trang SUN HEALTH được cấu tạo bởi 4 lớp, có tác dụng ngăn khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập. Phòng chống các bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc trong bệnh viện, môi trường công nghiệp độc hại.
- Lớp vải lọc khí không thấm nước, thoáng khí không gây dị ứng da.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Mở khẩu trang, bẻ thanh tựa mũi tạo độ kín. Chụp khẩu trang kín mũi và miệng. Kéo dây chun đeo vòng qua tai.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

- Chỉ sử dụng 1 lần, không tái sử dụng sau khi giặt.
- Không kéo quai khẩu trang quá mạnh để tránh bị giãn lỏng.
- Trường hợp kính mắt có thể bị mờ khi đeo khẩu trang, nên cẩn thận khi đi đường, lái xe.
- Trường hợp bị kích ứng da, ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để kiểm tra.

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm mốc.

HẠN DÙNG: 5 năm kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2020
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Chữ in đậm đầy đủ, chức danh)



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Ngọc Cường