

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
NƯỚC MUỐI BIỂN SÂU SEAFRESH AG+**

THÀNH PHẦN: cho lọ 70ml dung dịch

Sodium Clorid, Nano Bạc , Benzalkonium Clorid, Eucalytol Oil, Nước tinh khiết
vừa đủ

MỤC ĐÍCH/CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

- Dùng rửa mũi, súc miệng, súc họng hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm xoang mũi cấp và mãn tính, viêm mũi dị ứng, viêm tai, viêm họng.
- Kháng khuẩn, sát trùng nhẹ, dùng xịt, rửa vết thương, vết loét

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng
2. Đưa ngón trỏ lên đầu vòi phun
3. Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào vùng cần bảo vệ, ấn nhanh đầu phun 1 lần

Đối tượng sử dụng:

- Viêm xoang mũi: Xịt vào mũi mỗi ngày 2-3 lần
- Viêm tai: Xịt mỗi ngày 3 lần
- Viêm họng: xịt họng mỗi ngày 3-4 lần

Chống chỉ định:

Người quá mẫn cảm với bất kì thành phần của sản phẩm.

Bảo quản :

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

HSD : 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đăng kí và phân phối bởi : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP
EIFFEL**

Địa chỉ: Thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AEROCHEMIE**

Địa chỉ: Số 19, Đường Phúc hậu, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Phùng Duy Anh