
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TH OTLIVIN

THÀNH PHẦN: cho lọ 70ml dung dịch

Sodium clorid 0,9%, kẽm Guconat 0,05%, tinh dầu khuynh diệp, nước tinh khiết vừa đủ.

MỤC ĐÍCH/CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

-Làm sạch và rửa trôi dịch nhầy , giúp khoang mũi thông thoáng, ngăn ngừa sổ mũi, nghẹt mũi, duy trì độ ẩm tự nhiên cho mũi, tạo cảm giác sáng khoái, thoải mái hít thở

-Phòng tránh và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm đường hô hấp cấp và mạn tính

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đối tượng sử dụng:

1. Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
 2. Đặt ngón trỏ lên đầu vòi phun.
 3. Đưa nhẹ nhàng vòi phun vào vùng cần bảo vệ, ấn nhanh đầu phun 1 lần
- Xịt mũi mỗi ngày 1-3 lần

An toàn cho trẻ em và phụ nữ mang thai

Chống chỉ định:

Người quá mẫn cảm với bất kì thành phần của sản phẩm.

Bảo quản :

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

HSD : 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đăng kí và phân phối bởi : **CÔNG TY TNHH MICHA VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 109 tổ 9, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AEROCHEMIE**

Địa chỉ: Số 19, Đường Phúc hậu, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Thủy