

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA CHẤT NHUỘM

- Rửa nền lát cắt mô bằng Toluene, rửa bằng cồn và nước cất
- Thực hiện bộc lộ kháng nguyên với dung dịch bộc lộ kháng nguyên Antigel Retrieval
- Để tiêu bản nguội với nhiệt độ phòng, rửa với nước cất
- Khử peroxidase nội sinh, rửa trong TBS
- Ủ với chất chống tạo nền Protein Block, rửa trong TBS.
- Ủ với kháng thể chính, rửa trong TBS
- Ủ với dung dịch Post Primary, rửa trong TBS
- Ủ với dung dịch Novolink™ Polymer, rửa trong TBS
- Ủ với dung dịch DAB trong 20-30 giây, rửa bằng nước cất
- Ủ với dung dịch hematoxylin rửa bằng nước cất
- Khử cồn, gắn lamên, đọc kết quả

