

Mẫu nhãn :

1. **Tên trang thiết bị y tế:** **Khẩu trang Y tế**
2. **Thành phần cấu tạo:** Nẹp mũi cộng kẽm, thun đẹp, vải không dệt, vải lọc kháng khuẩn, vải viền.
3. **Số Phiếu công bố :** xxx
4. **Tên và địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế:**
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI NGHĨA

Địa chỉ: 108/2/13 Cộng Hòa, Phường 04 Quận Tân Bình, Tp.HCM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 443 đường Phạm Văn Sáng, ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM

5. **Xuất xứ trang thiết bị y tế:** Việt Nam
6. **Ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng.** Sản phẩm chỉ sử dụng một lần;
NSX:..., HSD: 5 năm kể từ NSX
7. **Số lô:**
8. **Hướng dẫn sử dụng:**
Kéo dây đeo ra, hướng mặt có màu ra phía ngoài
Đặt khẩu trang lên mặt, đeo dây vòng qua tai
Điều chỉnh nẹp mũi vừa sát khuôn mặt
Kéo mép dưới khẩu trang che kín cằm
Lưu ý: Khẩu trang chỉ sử dụng 1 lần
9. **Sản xuất theo TCCS 01:2020/TRUONGDAINGHIA**