

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ): **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM**

Địa chỉ trụ sở: 281/19/17 Lê Văn Sĩ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VINA FACEMASK MIỀN NAM - 151/105 Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 21 tháng 04 năm 2020

1. MÔ TẢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP THÔNG THƯỜNG

- Là sản phẩm khẩu trang dùng 01 lần, dạng phẳng, phần thân có nếp gấp để đảm bảo kích thước vừa che kín mũi và miệng. Có nếp mũi bằng kim loại bọc nhựa PVC và thun đeo co giãn.
- Cấu trúc gồm 04 lớp: 2-3 lớp vải không dệt, không hút nước (1 lớp trắng và 1 lớp có màu sắc theo yêu cầu của khách hàng); và 1-2 lớp vải vi lọc thấu khí không thấm nước.
- Kích thước ở dạng phẳng gấp- không tính thun: dài x rộng: 17.5 x 9.3cm (± 0.5 cm); dày từ 5-7mm;

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Hai tay sạch kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt.
- Tay phải giữ khẩu trang, tay trái đeo dây khẩu trang vào hai bên tai. Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho áp sát vào mũi

3. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

- Không tái sử dụng nhiều lần.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng.
- Không sử dụng chung khẩu trang chung với người khác.
- Nên bọc kín khẩu trang còn lại trong túi PE nếu không sử dụng hết để đảm bảo không bị nhiễm bẩn từ môi trường bên ngoài.
- Tránh kéo dẫn thun quá mức trước khi đeo sẽ làm mất độ đàn hồi của thun, làm khẩu trang không ôm vừa khít vùng mặt.
- Có thể gây ra hiện tượng vết hằn trên da mặt, tai do sử dụng trong thời gian dài.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



ĐẶNG HỒNG NAM