

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Khẩu trang y tế TPRO.MASK

Đơn vị: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HỒNG MINH

Địa chỉ: Số 10 D4, ngõ 12 đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0106726909

Ngày 04 tháng 05 năm 2020

Mục đích / Chỉ định sử dụng:

Được sử dụng để bịt vùng mặt (thường là mũi, miệng) để ngăn ngừa bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi thông qua đường hô hấp.

Hướng dẫn sử dụng:

- Sau khi lấy khẩu trang ra khỏi hộp thì bóc túi nilong và xác định đúng mặt và chiều của khẩu trang trước khi đeo.

- Xác định đúng mặt của khẩu trang như sau: mặt ngoài có màu đậm hơn (màu xanh) có tác dụng chống nước, tránh thấm các giọt bắn vào trong, mặt trong có màu nhạt hơn (màu trắng) có tác dụng hút ẩm, giúp hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang.

- Xác định đúng chiều của khẩu trang như sau: các nếp gấp có chiều hướng xuống dưới nhằm mục đích cho virus, vi khuẩn có chiều rơi xuống đất thay vì bám lại trên khẩu trang. Bên cạnh đó thanh nẹp phải ở phía trên để điều chỉnh sao cho ôm khít vào sống mũi.

- Giữ hai dây đeo bằng tay và kéo sang hai bên, áp sát vào mặt. Chính cho khẩu trang cân đối.

- Đeo dây quai qua tai và điều chỉnh thanh nẹp mũi sao cho khít với phần sống mũi và khuôn mặt.

- Định hình lại khẩu trang để có thể che phủ được phần sát mắt và dưới cằm sao cho khẩu trang che khít hoàn toàn khu vực cằm, miệng, mũi.

- Sử dụng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ dây kim loại nhỏ ở mặt trên khẩu trang sao cho ôm sát vào sống mũi, giữ kín cho vị trí tiếp xúc của khẩu trang với sống mũi để làm tạo độ kín giữa mũi với khẩu trang.

- Điều chỉnh khẩu trang đeo một cách thoải mái nhất.

- Sau khi sử dụng xong thì tháo khẩu trang bằng cách chạm vào dây quai, tránh chạm vào hai mặt trước - sau của khẩu trang.

Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý:

- Sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Khẩu trang sau khi được sử dụng thì cần được phân loại là rác thải hữu cơ và cho ngay vào thùng rác hữu cơ hoặc thùng rác thải y tế. Không được vứt, bỏ khẩu trang đã sử dụng ở các nơi công cộng.



- Khẩu trang chưa sử dụng cần được bảo quản trong hộp kín, để nơi khô mát, tránh để gần nguồn nhiệt, tránh tiếp xúc với các hóa chất, dung môi.
- Hạn sử dụng là 60 tháng kể từ ngày sản xuất.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Anh

