

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**KHẨU TRANG Y TẾ BẢO QUANG MASK, CHỨNG LOẠI: 3 LỚP**

**1. Mô tả**

- Khẩu trang y tế là khẩu trang 03 lớp trong đó có lớp vải lọc kháng khuẩn.
- Thanh tựa mũi có khả năng uốn dẻo tạo hình cao, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm khít khuôn mặt.
- Dây đeo chắc chắn, có độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

**2. Mục đích sử dụng:**

- Ngăn chặn sự xâm nhập của khói bụi, không khí ô nhiễm, khí độc, vi khuẩn, virus vào đường hô hấp.
- Giúp phòng các bệnh đường hô hấp do khói bụi, các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường hô hấp.

**3. Hướng dẫn sử dụng:**

- Mở khẩu trang, nắn thanh tựa mũi tạo độ kín.
- Kéo dây thun đeo khẩu trang vòng qua tai.
- Chụp khẩu trang kín mũi miệng.

**4. Cảnh báo và thận trọng:**

- Chỉ sử dụng 1 lần, không tái sử dụng sau khi giặt.
- Không kéo quai khẩu trang quá mạnh để tránh bị giãn lỏng.
- Một số trường hợp, kính mắt có thể bị mờ khi sử dụng khẩu trang, nên cẩn thận khi lái xe.
- Không sử dụng khi gần nguồn lửa hoặc khi đang xảy ra hỏa hoạn.
- Trường hợp bị kích ứng da, ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để kiểm tra

**5. Điều kiện bảo quản:**

- *Điều kiện bảo quản:* Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

**6. Cơ sở sở hữu TTBYT:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG**

Địa chỉ: Nhà số 4 Lô G khu nhà ở Ban Đảng TW đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, VN.

**7. Cơ sở sản xuất**

Nhà máy HDPharma EU – Công ty CP Dược VITYT Hải Dương



Địa chỉ: Thửa đất số 307 Cụm công nghiệp Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3853848 Fax: 0220.3853848

**8. Cơ sở phân phối:**

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG

Địa chỉ: Nhà số 4 lô G khu nhà ở Ban Đảng TW đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Đông, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đình Hoàng*

