



## CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 146 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, TP.HCM.

Điện thoại : 028 – 38585594 Fax : 028 – 39624247

Email: bayoka146148@gmail.com

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### I/ CÔNG DỤNG

- Khẩu trang y tế dùng để ngăn ngừa, bảo vệ các khối bụi, mùi khói xe hay các chất độc hại và phòng tránh một số bệnh về hô hấp.

### II/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Khẩu trang có 2 mặt chúng ta sẽ đeo mặt màu trắng đeo vào trong, màu xanh nằm phía ngoài. Sau khi mắc 2 dây vào tai, kéo nhẹ cạnh dưới xuống quá cằm 1 chút, gọng chì lên trên cánh mũi và dùng tay bóp thanh chì sao cho ôm khít vào sống mũi. Dùng ngón cái và trỏ miết nhẹ hai bên khẩu trang để khít vào má.
- Với loại khẩu trang y tế chỉ nên dùng một lần hoặc tối đa một ngày.
- Khi thanh lý những chiếc khẩu trang y tế, bạn không được vứt bừa bãi mà phải cho vào thùng rác để tránh vi khuẩn có cơ hội phát tán.

### III/ BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, không có hóa chất, bụi làm ảnh hưởng xấu tới chất lượng sản phẩm, không chồng chất quá cao gây đổ vỡ.