

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN CUỘC SỐNG AN TOÀN
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
KHẨU TRANG Y TẾ SAFEMASK**

1. Rửa tay đúng cách với dung dịch kháng khuẩn.
2. Đeo mặt màu xanh của khẩu trang ra ngoài, mặt màu trắng quay vào trong.
3. Đặt phần có nẹp phía trên sống mũi.
4. Vòng dây đeo qua sau tai một cách chắc chắn.
5. Bảo đảm khẩu trang che kín phần mũi, cằm và không có khoảng trống.
6. Điều chỉnh phần nẹp ôm vào hai bên sống mũi.
7. Sau khi sử dụng, nắm phần dây đeo sau tai và tháo khẩu trang ra khỏi mặt.
8. Bỏ khẩu trang đúng nơi quy định, không chạm tay vào mặt trước khẩu trang.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



Trần Phương Thảo