

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT
TRIỂN ĐẠI NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

6. Cơ sở sản xuất TTBVT:

Số: 12052020

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2020.

Địa chỉ: Số 15 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam

7. Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NAM

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KHẨU TRANG Y TẾ

MÃ SẢN PHẨM: ĐN68

Hà Tĩnh, Ngày 1 tháng 6 năm 2020

1. Mô tả:

- Khẩu trang y tế là khẩu trang 04 lớp từ ngoài vào trong: Lớp 1 là lớp vải không dệt, không thấm; Lớp 2 là lớp vi lọc; Lớp 3 là lớp vải kháng khuẩn; Lớp 4 là lớp vải không dệt, thân thiện với da.
- Thanh tựa mũi có khả năng uốn dẻo tạo hình cao, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm khít khuôn mặt.
- Dây đeo chắc chắn, có độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

2. Mục đích sử dụng:


- Ngăn chặn sự xâm nhập của khói bụi, không khí ô nhiễm, khí độc, vi khuẩn, virus vào đường hô hấp.
- Giúp phòng các bệnh đường hô hấp do khói bụi, các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường hô hấp.

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Mở khẩu trang, nắm thanh tựa mũi tạo độ kín.
- Kéo dây thun đeo khẩu trang vòng qua tai.
- Chụp khẩu trang kín mũi miệng.

4. Cảnh báo và thận trọng:

- Chỉ sử dụng 1 lần, không tái sử dụng sau khi giặt.
- Không kéo quai khẩu trang quá mạnh để tránh bị giãn lỏng.
- Một số trường hợp, kính mắt có thể bị mờ khi sử dụng khẩu trang, nên cẩn thận khi lái xe.
- Không sử dụng khi gần nguồn lửa hoặc khi đang xảy ra hỏa hoạn.
- Trường hợp bị kích ứng da, ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để kiểm tra.

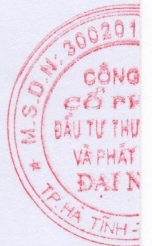

5. Điều kiện bảo quản:

- Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

6. Cơ sở sở hữu TTBVT :

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 15 đường Nguyễn Hữu Thái, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam

7. Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI NAM

Địa chỉ: Thôn Tân tiến, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Hà Tĩnh, Ngày 2 Tháng 6 năm 2020

1. Mô tả:

- Khẩu trang y tế là khẩu trang 04 lớp từ ngoài vào trong lớp ngoài không dệt, không thấm, Lớp 2 là lớp vi lọc, Lớp 3 là lớp lọc, lớp 4 là lớp vải không dệt, thấm thiện với da.
- Thanh tựa mũi có khả năng uốn dẻo tạo hình các đường cong và tạo độ kín, ôm khít khuôn mặt.
- Dây đeo chắc chắn, có độ co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

2. Mục đích sử dụng:


- Ngăn chặn sự xâm nhập của khói bụi, không khí ô nhiễm, khí độc, vi khuẩn, virus vào đường hô hấp.
- Giúp phòng các bệnh đường hô hấp do khói bụi, các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường hô hấp.

3. Hướng dẫn sử dụng:

- Mở khẩu trang, uốn thanh tựa mũi tạo độ kín.
- Kéo dây thun đeo khẩu trang vòng qua tai.
- Chep khẩu trang kín mũi miệng.

4. Cảnh báo và thận trọng:

- Chỉ sử dụng 1 lần, không tái sử dụng sau khi giặt.
- Không leo quai khẩu trang quá mạnh để tránh bị giãn lỏng.
- Một số trường hợp, kính mắt có thể bị mờ khi sử dụng khẩu trang, nên cẩn thận khi lái xe.
- Không sử dụng khi gần nguồn lửa hoặc khi đang xảy ra hỏa hoạn.
- Trường hợp bị kích ứng da, ngưng sử dụng và đến cơ sở y tế để kiểm tra.

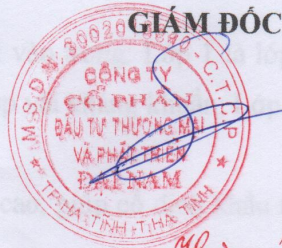

Hoàng Văn Sơn

