

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Bộ trang phục phòng, chống dịch
Model: BPD-HQGANO

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO

Địa chỉ: Số 626, Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0312270403

Ngày 01 tháng 06 năm 2020

Mục đích / Chỉ định sử dụng:

Được sử dụng để bảo vệ và giúp nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch bệnh tránh khỏi nguy cơ bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, virus ở môi trường có khả năng lây nhiễm cao trong quá trình khám, chữa bệnh hoặc tham gia phòng chống dịch bệnh.

Hướng dẫn sử dụng (khi kết hợp cùng với bao giày, kính, găng tay, khẩu trang):

a) Trước khi mặc:

- Chọn ra và chuẩn bị tất cả những phương tiện bảo hộ cần thiết và phù hợp với mục đích sử dụng.
- Kiểm tra bao gói và tính nguyên vẹn của các sản phẩm trong Bộ trang phục phòng, chống dịch.
- Nên đi vệ sinh và thực hiện các nhu cầu cá nhân trước khi mặc nếu xác định quá trình sử dụng trong thời gian dài.

b) Quy trình mặc:

- Bước 1: Vệ sinh tay.
- Bước 2: Mặc bộ đồ liền quần, áo, mũ trùm đầu và bao giày.
- Bước 3: Mang khẩu trang.
- Bước 4: Mang kính bảo hộ.
- Bước 5: Đội mũ trùm đầu.
- Bước 6: Vệ sinh tay.
- Bước 7: Mang găng tay.
- Bước 8: Chính sửa lại trang phục sao cho cảm thấy thoải mái và trùm kín các vị trí cần thiết trên cơ thể.

c) Quy trình cởi:

- Bước 1: Tháo găng. Khi tháo cuộn mặt ngoài găng vào trong thành túi. Cho ngay vào thùng rác thải y tế.
- Bước 2: Tháo toàn bộ quần, áo, mũ và bao giày: Mở khóa kéo. Tháo toàn bộ mũ, áo và quần một lần, ra phía sau, cuộn làm sao để mặt trong của đồ phủ ra ngoài, tháo bao giày cũng sao cho mặt trong phủ ra ngoài và bỏ ngay tất cả vào thùng rác thải y tế.
- Bước 3: Vệ sinh tay.
- Bước 4: Tháo kính bảo hộ. Cho ngay vào thùng rác thải y tế.

- Bước 5: Tháo khẩu trang. Chú ý không được chạm vào mặt trước của khẩu trang. Cho ngay vào thùng rác thải y tế.
- Bước 6: Vệ sinh tay.

Chú ý: Nhớ phân loại rác khi cho các phần của Bộ trang phục phòng, chống dịch vào thùng rác thải y tế.

Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý:

- Sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Bộ trang phục phòng, chống dịch sau khi được sử dụng thì cần được phân loại là rác thải y tế và cho ngay vào thùng rác thải y tế. Không được vứt, bỏ các rác thải này ở các nơi công cộng.
- Trước khi sử dụng thì cần kiểm tra bao gói và tính nguyên vẹn của các sản phẩm. Không sử dụng các sản phẩm đã bị rách, thủng, hư hỏng.
- Bộ trang phục phòng, chống dịch khi chưa sử dụng cần được bảo quản trong thùng hoặc túi kín, để nơi khô mát, tránh để gần nguồn nhiệt, tránh tiếp xúc với các hóa chất, dung môi.
- Phương tiện vận chuyển Bộ trang phục phòng, chống dịch phải khô, sạch, được che mưa nắng, không có chất độc hại và không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.
- Hạn sử dụng là 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



Huỳnh Tiến Hạnh