

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KHẨU TRANG Y TẾ ĐÚNG CÁCH VÀ AN TOÀN

Cách sử dụng:

Vệ sinh tay sạch sẽ, xoay khẩu trang đúng chiều, khẩu trang có hai mặt, đeo mặt trắng vào trong mặt có màu sắc khác nằm ở phía ngoài.

Bước 1 : Kéo dây đeo tai.

Bước 2 : Khẩu trang chống cằm

Bước 3 : Kéo dây tai trở lại tai và treo lên tai cho đến khi cảm thấy thoải mái.

Bước 4 : Chỉnh khẩu trang của bạn để kiểm tra độ kín với khuôn mặt của bạn.

Lưu ý: Khẩu trang y tế sử dụng 1 lần. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Mục đích: Ngăn ngừa bụi cơ học và từ chế biến khoáng sản bao gồm than đá, quặng sắt và silica hoặc bông, bột và một số chất khác. Ngoài ra có thể sử dụng để phòng dịch bệnh; Bệnh viện, phòng khám, Nha khoa; Công nghiệp; Chống bụi, chống tia UV.

Bảo quản: Để sản phẩm ở nơi khô ráo sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt. không để gần nơi hóa chất độc hại và không chồng chất vật nặng lên trên gây rách, vỡ bao bì.

Khuyến cáo: Các ứng dụng phun sơn và phun cát hoặc để bảo vệ chống lại khí và hơi. Bảo vệ ở nơi thiếu oxy vì khẩu trang (mặt nạ) này không cung cấp oxy. Không sử dụng trong môi trường không khí có bụi dầu.

Người đeo trước tiên phải được huấn luyện cách sử dụng phù hợp và kiểm tra sự phù hợp trước khi sử dụng mặt nạ này.

Không sử dụng mặt nạ này khi nồng độ chất gây ô nhiễm ngay lập tức nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe.

Rời khỏi khu vực ngay lập tức nếu: Hơi thở trở nên khó khăn; Chóng mặt hoặc đau khổ khác xảy ra;

Hủy bỏ và thay thế mặt nạ nếu nó bị hỏng hoặc khó thở trở nên quá mức.

Khẩu trang (mặt nạ) này không cung cấp oxygen. Sử dụng thói trong khí quyển chứa ít hơn 18% oxy. Chỉ sử dụng trong khu vực thông gió đầy đủ.

Không thay đổi, rửa, lạm dụng hoặc sử dụng sai khẩu trang này.

Không sử dụng với râu hoặc tóc trên khuôn mặt khác hoặc các điều kiện khác ngăn chặn một dấu tốt giữa mặt và cạnh niêm phong của mặt nạ.

Có thể được sử dụng đến giới hạn được chỉ định bởi các quy định của chính phủ áp dụng cho sản phẩm này.

Không tuân theo tất cả các hướng dẫn và cảnh báo về việc sử dụng mặt nạ này và / hoặc không đeo mặt nạ này trong tất cả các lần tiếp xúc có thể làm giảm hiệu quả của mặt nạ và có thể dẫn đến bệnh tật hoặc thương tật vĩnh viễn.

Khẩu trang chỉ sử dụng 01 lần.

Không dùng sản phẩm hết hạn sử dụng.

Không sử dụng sản phẩm hết hạn, không để sản phẩm nơi ẩm ướt và nơi có nhiệt độ cao.

Phiếu tiếp nhận cơ sở sản xuất số: 200000011/PCBSX-TB

Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn số: xxxxxxxxxxxx/PCBA- TB

Giấy phép lưu hành số: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/CFS/BYT-TB-CT

Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS: 02/2020/THACO

Nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13485:2016

Nhà máy sản xuất: CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG

Địa chỉ: số 15 đường Trần Quang Khải, tổ 16, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Số lô:

Ngày sản xuất: (xem trên bao bì)

Hạn sử dụng: (xem trên bao bì)