

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## Máy kéo giãn cổ, cột sống trị liệu



Model: HT -101 BIOTRACK, HT- 102 BIOTRACK

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thế Anh*

### Kéo cột sống

- Bật nguồn điện 220V/ 50Hz
- ấn nút On màn hình hiển thị sẽ sáng và hiển thị " đợi 30 giây". Khi hết 30 giây nó sẽ có tín hiệu.
- Sau 30 giây sẽ có tín hiệu và nếu bàn không thể gấp lại hoàn toàn thì phải ấn nút " ra khẩn cấp" để tiếp tục để nguyên cho nó gấp lại mới hết.
- Cài đặt: ấn nút "choice lựa chọn", đèn sẽ sáng và có âm thanh báo(chọn tổng thời gian, thời gian ngừng ngắt, lực kéo theo vị trí của bóng đèn sáng) và ấn nút +, - để cài đặt các thông số người sử dụng muốn.
- Dừng việc cài đặt sau đó ấn nút "operate hoạt động". Bàn sẽ hoạt động ở chế độ tự động.
- Khi kết thúc việc kéo sẽ có âm thanh "di di " báo, hiển thị ngày "00", cạnh bàn gấp lại.
- Khi kết thúc việc kéo thoát dây kéo cho bệnh nhân, để bệnh nhân nghỉ 1 lát.
- Nút ra khẩn cấp: nếu bệnh nhân cảm thấy không thoải mái thì ấn nút này.

### Kéo cổ

- Bác sĩ cố định đệm đầu cho bệnh nhân. Sau khi điều chỉnh vị trí thích hợp cố định bệnh nhân
- Lực kéo lớn hay nhỏ dựa vào tình trạng BN quyết định. Thông thường kéo từ nhẹ đến mạnh.
- Luôn luôn ở bên cạnh bệnh nhân khi điều trị, tránh gây đau đớn cho người bệnh, đạt được mục đích điều trị.

Chú ý: Có thể kéo cổ và cột sống cùng 1 lúc.

### Những điều cần chú ý

- Khi sử dụng điện áp phải từ AC 190V-240V. Nếu không phải có ổn áp 2KW3KW
- Không được để máy dưới ánh nắng, trong môi trường ẩm ướt.
- Phải thay dây buộc khi dây cũ hoặc bị sờn.