


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

(Khẩu trang y tế)

I. Thao tác và cách sử dụng:

- Hai tay kéo hai dây khẩu trang sang hai bên mặt, áp sát vào mặt.
- Tay phải giữ khẩu trang, tay trái đeo dây khẩu trang vào hai bên tai.
- Kéo nhẹ cạnh dưới quá cằm một chút, đặt thanh nẹp lên cánh mũi, dùng tay bóp nhẹ gọng sao cho áp sát vào mũi.
- Khi không sử dụng khẩu trang nữa, dùng tay tháo dây đeo và bỏ khẩu trang vào thùng rác theo đúng quy định. Tránh cầm trực tiếp vào bề mặt khẩu trang đã qua sử dụng nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm virus, vi khuẩn gây bệnh.

II. Một số lưu ý khi sử dụng:

- Không sử dụng trong trường hợp: Khẩu trang đã qua sử dụng hoặc tái sử dụng nhiều lần.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không sử dụng chung khẩu trang chung với người khác.
- Khẩu trang chỉ dùng một lần.
- Đeo khẩu trang đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không dùng khẩu trang không rõ nguồn gốc.
- Đối với khẩu trang y tế được đóng bịch: Khi xé bịch để lấy khẩu trang sử dụng, nếu không dùng hết khẩu trang ở trong bịch đã xé, bạn nên cho lại vào bịch để dán hoặc cột kín lại. 

Người đại diện hợp pháp của cơ sở 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bé Đức Thuận