

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHOAN XƯƠNG ĐIỆN



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: KHOAN XƯƠNG ĐIỆN Nhà sản xuất: WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT&DEVICE CO.,LTD	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Đặc điểm kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none">- Khoan xương điện được sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật chỉnh hình.- Sử dụng điện áp thấp (9.6V) an toàn và đáng tin cậy.- Thời gian sạc ngắn, tiêu thụ công suất thấp- Dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	- Thân máy; 02 Pin 9.6V kèm theo máy; Dụng cụ tháo lắp mũi khoan; đầu mũi khoan.. - Bộ sạc pin, Hộp valy đựng,
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Được thiết kế để sử dụng trong việc phẫu thuật chỉnh hình tại phòng khám, bệnh viện và các cơ sở y tế. Việc sử dụng khoan được thực hiện bởi các kỹ thuật viên và bác sỹ phẫu thuật có chuyên môn.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Sau khi mở valy đựng. Cắm pin vào khoan, Nếu đèn xanh có nghĩa pin khỏe có thể sử dụng bình thường, Nếu Pin yếu. Dùng bộ sạc kèm theo để sạc pin. Dùng dụng cụ kèm theo để lắp mũi khoan. Sau khi gắn chặt mũi khoan bắt đầu sử dụng khoan bình thường.
1.5	Chống chỉ định	Giữ khoan sạch sẽ, lau bằng nước sạch. Không xả nước trực tiếp lên khoan
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không xả nước trực tiếp lên khoan. Giữ khoan luôn sạch sẽ Chỉ sử dụng khoan cho mục đích y tế
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Hiện tại chưa có ghi nhận về tác dụng bất lợi xảy ra khi sử dụng sản phẩm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỬA CẮT BỘT



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: CỬA CẮT BỘT Nhà sản xuất: WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMEN&DEVICE CO.,LTD	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Đặc điểm kỹ thuật: - Lưỡi cưa bằng hợp kim thích hợp sử dụng trong thời gian dài - Chức năng bảo vệ nhu mô an toàn và đáng tin cậy - Thích hợp để cắt bột bó dùng trong chấn thương chỉnh hình, các chất nhựa phân tử lớn dùng trong chấn thương chỉnh hình. - Cưa có độ ồn thấp
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	- Bộ sản phẩm gồm có: Thân cưa, Lưỡi cưa, Dụng cụ vận tháo lưỡi cưa, Hộp đựng
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Được thiết kế để sử dụng trong việc phẫu thuật chỉnh hình tại phòng khám, bệnh viện và các cơ sở y tế.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	1. Cắm nguồn, giữ thạch cao thật chặt để cắt. Chú ý rằng lưỡi cưa sắc, vì thế trước khi sử dụng, không bật công tắc của cưa trước để tránh gây nguy hiểm. Đưa lưỡi cưa từ từ vào thạch cao 2. Giữ chặt thạch cao và bật công tắc. Nếu không có bất thường, đặt lưỡi cưa vào bề mặt cần cắt, sau đó đưa từ từ xuống cho đến khi thạch cao bị xuyên thủng. Nếu chất liệu thạch cao là chất liệu Polyester cứng, có thể di chuyển cưa song song với bề mặt thạch cao. Nếu không chắc chắn, đừng cắt hết (mặc dù cưa thạch cao này có chức năng bảo vệ mô mềm). 3. Cắt thạch cao theo hướng thẳng đứng hướng xuống, sau đó nhấc lưỡi cưa lên và di chuyển về trước để cắt phần tiếp theo 4. Tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi kết thúc việc cắt. 5. Nếu lưỡi cưa bị mòn, có thể ở bulông ra bằng dụng cụ vận ốc, thay lưỡi cưa và xoay để vận chặt lưỡi cưa lại 6. Nếu có tiếng ồn lớn trong khi sử dụng, dừng việc sử dụng sản phẩm, kiểm tra sự bất thường



		7. Kiểm tra cáp thường xuyên trong khi sử dụng để tránh sử dụng cáp bị mòn
1.5	Chống chỉ định	Giữ cửa sạch sẽ, lau bằng nước sạch. Không xả nước trực tiếp lên cửa
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không xả nước trực tiếp lên cửa. Giữ cửa luôn sạch sẽ Chỉ sử dụng cửa cho mục đích y tế
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Hiện tại chưa có ghi nhận về tác dụng bất lợi xảy ra khi sử dụng sản phẩm.