


TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
GIƯỜNG BỆNH NHÂN 4 TAY QUAY
MODEL: DP-E05



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Nguyên lý hoạt động:</p> <p>Giường sử dụng hệ thống 4 tay quay được gắn phía bên hông giường để điều chỉnh góc phù hợp với bệnh nhân.</p> <p>Tính năng:</p> <ul style="list-style-type: none">- Giường có bốn tay quay để điều khiển nâng phần đầu, nâng chân và nghiêng hai bên, hai tay quay để bên hông giường.- Phần giữa có khoét lỗ để bảo vệ sinh.


		<ul style="list-style-type: none"> - Một cây truyền dịch. - Hai đầu giường làm bằng nhựa ABS có thể tháo lắp dễ dàng. - Hai thanh chắn hai bên thành giường làm bằng nhôm. Có vị trí gắn bàn ăn thêm cho giường. - Khung giường được dập khuôn và xử lí qua công nghệ sơn phun tĩnh điện, tăng độ bền và chống rỉ sét. - Bánh xe có kích thước 5'', bốn bánh xe đều có khóa. <p>Thông số kĩ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi nâng đầu giường từ 0 - 80 độ (+-5). - Phạm vi nâng chân từ 0-55 độ (+-5). - Phạm vi nghiêng trái, phải từ 0-55 độ (+-5). - Kích thước: 2080*960*540mm. - Trọng lượng: 92 kg. - Tải trọng: 250 kg.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> - 1 cây truyền dịch. - 1 bồn gọi đầu. - 1 bộ vệ sinh. - 1 bộ nệm. - 1 bàn ăn.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<p><i>Nêu mục đích sử dụng/ chỉ định sử dụng của trang thiết bị y tế.</i></p> <p>Dùng để chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám hoặc tại nhà.</p>
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<p>Mô tả phần:</p>  <p><i>các bộ</i></p>

		Sử dụng tay quay: xoay tay quay để điều chỉnh góc của giường.
1.5	Chống chỉ định	Không có.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> - Không đặt tay vào các khớp chuyển động của giường. - Không sử dụng quá tải trọng của giường.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có). - Không có.	
3	Thông tin đã đăng kí tại các nước (nếu có). - Không có.	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế. - Không có.	

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
GIƯỜNG BỆNH NHÂN 4 TAY QUAY
MODEL: DP-E28



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Nguyên lí hoạt động:</p> <p>Giường sử dụng hệ thống 3 tay quay và 1 cần gạt bảo vệ sinh được gắn bên hông giường để điều chỉnh góc phù hợp với bệnh nhân.</p> <p>Tính năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giường có ba tay quay để điều khiển nâng phần đầu, nâng chân, nghiêng hai bên. Ba tay quay và cần gạt bảo vệ sinh được xếp gọn bên dưới chân giường. - Phần giữa có khoét lỗ để bảo vệ sinh. - Một cây truyền dịch. - Hai đầu giường làm bằng nhựa ABS có thể tháo lắp dễ dàng. - Hai thanh chắn hai bên thành giường làm bằng nhôm và có thể xếp gọn dễ dàng. - Khung giường được dập khuôn và xử lí qua công nghệ sơn phun tĩnh điện, tăng độ bền và chống rỉ sét.


		<ul style="list-style-type: none"> - Bánh xe có kích thước 5'', bốn bánh xe đều có khóa. <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi nâng đầu giường từ 0 - 80 độ. - Phạm vi nâng chân từ 0-55 độ. - Kích thước: 2080*960*540mm (dài, rộng, cao). - Trọng lượng: 92 kg. - Tải trọng: 250 kg.
<p>1.2</p>	<p>Danh mục linh kiện và phụ kiện</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 giường. - 1 bộ vệ sinh. - 1 bộ nệm. - 1 bàn ăn. - 1 cây truyền dịch. - 1 chậu gội đầu.
<p>1.3</p>	<p>Mục đích/Chỉ định sử dụng</p>	<p><i>Nêu mục đích sử dụng/ chỉ định sử dụng của trang thiết bị y tế.</i></p> <p>Dùng để chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám hoặc tại nhà.</p>
<p>1.4</p>	<p>Hướng dẫn sử dụng</p>	<p>Mô tả các bộ phận:</p>  <p>Sử dụng tay quay: xoay tay quay để điều chỉnh góc của giường.</p>

1.5	Chống chỉ định	- Không có.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	- Không đặt tay vào các khớp chuyển động của giường. - Không sử dụng quá tải trọng của giường.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Không có.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có). - Không có.	
3	Thông tin đã đăng kí tại các nước (nếu có). - Không có.	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế. - Không có.	

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
GIƯỜNG BỆNH NHÂN 2 TAY QUAY
MODEL: DP-M16



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Nguyên lý hoạt động:</p> <p>Giường sử dụng hệ thống 2 tay quay được gắn phía đuôi giường để điều chỉnh góc phù hợp với bệnh nhân.</p> <p>Tính năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giường có hai tay quay để điều khiển nâng phần đầu, nâng chân. Hai tay quay được xếp gọn bên dưới chân giường. - Hai đầu giường làm bằng nhựa ABS có thể tháo lắp dễ dàng. - Hai thanh chắn hai bên thành giường làm bằng nhôm và có thể xếp gọn dễ dàng. - Khung giường được dập khuôn và xử lý qua công nghệ sơn phun tĩnh điện, tăng độ bền và chống rỉ sét. - Bánh xe có kích thước 5'', bốn bánh xe đều có khóa. <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi nâng đầu giường từ 0 - 80 độ. - Phạm vi nâng chân từ 0-40 độ.


		<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 217 x 100 x 55 cm (dài, rộng, cao). - Trọng lượng: 60 kg. - Tải trọng: 200 kg.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bộ vệ sinh. - 1 bộ nệm. - 1 giường.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<p><i>Nêu mục đích sử dụng/ chỉ định sử dụng của trang thiết bị y tế.</i></p> <p>Dùng để chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám hoặc tại nhà.</p>
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<p><i>Mô tả các bộ phận:</i></p>  <p>Sử dụng tay quay: xoay tay quay để điều chỉnh góc của giường.</p>
1.5	Chống chỉ định	<ul style="list-style-type: none"> - Không có.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> - Không đặt tay vào các khớp chuyển động của giường. - Không sử dụng quá tải trọng của giường.

1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Không có.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có). - Không có.	
3	Thông tin đã đăng kí tại các nước (nếu có). - Không có.	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế. - Không có.	

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
GIƯỜNG BỆNH NHÂN 1 TAY QUAY
MODEL: DP-M17



STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Nguyên lí hoạt động:</p> <p>Giường sử dụng hệ thống 1 tay quay được gắn phía đuôi giường để điều chỉnh góc phù hợp với bệnh nhân.</p> <p>Tính năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giường có một tay quay để điều khiển nâng phần đầu. Một tay quay được xếp gọn bên dưới chân giường. - Hai đầu giường làm bằng nhựa ABS có thể tháo lắp dễ dàng. - Hai thanh chắn hai bên thành giường làm bằng nhôm và có thể xếp gọn dễ dàng. - Khung giường được dập khuôn và xử lí qua công nghệ sơn phun tĩnh điện, tăng độ bền và chống rỉ sét. - Bánh xe có kích thước 5'', bốn bánh xe đều có khóa. - Cây treo chai truyền dịch làm bằng inox. - Có 2 móc treo túi tiểu và 6 vị trí gắn cây treo truyền dịch. <p>Thông số kĩ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi nâng đầu giường từ 0 - 70 độ. - Kích thước: 2130 x 980 x 500 mm (dài, rộng, cao).

		- Tải trọng: 280 kg.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	- 1 bộ nệm. - 1 giường.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<i>Nêu mục đích sử dụng/ chỉ định sử dụng của trang thiết bị y tế.</i> Dùng để chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, phòng khám hoặc tại nhà.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Mô tả các bộ phận:  Sử dụng tay quay: xoay tay quay để điều chỉnh góc của giường.
1.5	Chống chỉ định	- Không có.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	- Không đặt tay vào các khớp chuyển động của giường. - Không sử dụng quá tải trọng của giường.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Không có.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có). - Không có.	
3	Thông tin đã đăng kí tại các nước (nếu có).	

	- Không có.
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế. - Không có.

Cơ sở đăng kí lưu hành cam kết nhưng nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ kí số

NGUYỄN PHƯỚC TÂY
GIÁM ĐỐC