



MẪU NHÃN SẼ SỬ DỤNG KHI LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỦA
BỘ DỤNG CỤ RỬA MŨI VÀ GÓI HỖN HỢP PHA DUNG DỊCH RỬA MŨI

Tên trang thiết bị y tế:

Qui cách:.....

Thành phần 1 gói: Sodium Chloride, Sodium Bicarbonate

Số lưu hành:

Sản xuất bởi: NeilMed Pharmaceuticals, Inc. 601 Aviation Blvd, Santa Rosa, CA 95403, Mỹ.

Nhà nhập khẩu:.....

Tên và địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành, nhà phân phối và cơ sở bảo hành: Công ty TNHH SILAB Việt Nam. Số 2 Trần Nhân Tôn, P2, Q10, TP. HCM.

ĐT: (028) 62 534 533 / (028) 22 45 46 47 / 0931 416 616

Xuất xứ: Mỹ

Hạn sử dụng: xem  trên hộp

Số lô: xem LOT trên hộp

Công dụng: Rửa sạch bụi bẩn và các tác nhân có thể gây bệnh mũi xoang (chất ô nhiễm, nấm mốc, dị nguyên). Làm giảm và ngăn ngừa các triệu chứng viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nghẹt mũi, chảy mũi, khô mũi và các triệu chứng mũi của cảm cúm. Vệ sinh mũi hàng ngày.

Cách dùng: Bước 1: Rửa tay, đổ nước sạch (tinh khiết, lọc, đun sôi để nguội hoặc ấm (37 độ C)) vào bình đến vạch 240ml (hoặc vạch 120ml ở bình trẻ em). Pha 1 gói rửa mũi vào bình, lắc đều cho tan hết. Bước 2: Đứng thẳng, đầu hướng xuống bồn rửa, há và chỉ thở bằng miệng. Đặt đầu vòi xịt vào 1 bên lỗ mũi, bóp giữ bình để cho dung dịch chảy từ bình vào lỗ mũi bên này rồi chảy ra ở lỗ mũi bên kia đến khi hết ½ bình. Xì mũi thật nhẹ nhàng để loại bỏ dung dịch trong mũi. Lặp lại động tác cho bên mũi còn lại. Bước 3: Rửa sạch bình và nắp dụng cụ sau khi dùng, lau khô.

Không dùng cho bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ phòng.

Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để tra cứu thêm thông tin về sản phẩm và Hướng dẫn sử dụng, xin vui liên hệ Nhà phân phối hoặc truy cập website: www.neilmed.com.vn