



## CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA

129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3930 8556 - 3930 8557 Fax: (028) 3930 6658

MST: 0305854197

Website: www.cvssurgical.com

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

STT	Nội dung	Mô tả
1	Tên trang thiết bị y tế:	- Miếng lọc dùng cho hộp đựng dụng cụ
2	Chỉ định sử dụng	- Miếng lọc dùng cho hộp đựng dụng cụ - Gắn vào nắp hộp hấp đựng các dụng cụ phẫu thuật để làm màng lọc khuẩn trong quá trình tiệt khuẩn và bảo quản dụng cụ phẫu thuật
3	Mục đích	- Là màng lọc khuẩn được gắn vào nắp hộp hấp. Trong quá trình tiệt khuẩn, dưới tác dụng nhiệt độ và áp suất màng lọc sẽ giãn nở để cho hơi nước nóng vào bên trong hộp hấp để tiêu diệt vi khuẩn và bào tử, cho sản phẩm được vô trùng. Kết thúc quá trình hấp, kích thước các lỗ lọc này tự động đóng lại, ngăn cản vi khuẩn, bụi bẩn và các chất từ ngoài môi trường vào bên trong hộp, giữ sản phẩm bên trong luôn luôn được vô trùng.
4	Hướng dẫn sử dụng	1. Xử lý dụng cụ và đặt dụng cụ cần hấp vào trong hộp hấp theo quy trình hấp tiệt khuẩn 2. Tháo dụng cụ giữ miếng lọc ở nắp hộp 3. Kiểm tra miếng lọc: có bị ố vàng, bị thủng, rách, còn số lần sử dụng hay không (Không có các nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình hấp --> sử dụng tiếp, nếu có nguy cơ nên thay miếng lọc mới) 4. Gắn miếng lọc đã kiểm tra vào nắp hộp hấp ở vị trí gắn miếng lọc 5. Gắn dụng cụ giữ miếng lọc và kiểm tra sự chắc chắn 6. Đậy nắp hộp hấp 7. Tiệt khuẩn theo quy trình
5	Cảnh báo và thận trọng	- Miếng lọc có quy định loại tái sử dụng (có giới hạn số lần) hoặc loại sử dụng 1 lần. Đọc kỹ quy định của nhà sản xuất - Nếu miếng lọc có quy định giới hạn sử dụng, nhân viên CSSD nên ghi chú lại số lần đã qua sử dụng để thay thế miếng mới khi hết hạn dùng - Không để vật nhọn, sắc đâm thủng miếng lọc - Bề mặt miếng lọc có hiện tượng ố vàng, nâu đen nên thay đổi miếng khác
6	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Sản phẩm không được vô trùng khi các miếng lọc bị thủng, rách - Nhiễm chéo giữa các dụng cụ nếu miếng lọc không được an toàn

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

