



Băng gạc cầm máu Mũi Xoang RAPID RHINO®

Hướng dẫn Sử dụng

MÔ TẢ

Băng gạc mũi xoang RAPID RHINO® sử dụng chất liệu mút PU foam chuyên dụng cho y tế với cấu trúc tế bào mở để uốn nắn, có thể co nén rồi trở về dung tích tối đa. Cơ chất foam giúp nâng và lấp đầy các khoang mũi hoặc xoang. Mút được phủ tấm film PVC, bao bọc bên ngoài là băng carboxymethylcellulose (CMC) liên kết chịu lực. Với thiết kế có tính thấm để tạo gel, băng không chỉ giúp cầm máu nhỏ giọt, mà còn cung cấp một môi trường ẩm ướt để dễ dàng rút dụng cụ. Thành phần hydrocolloid của băng tạo nên lớp gel ẩm làm vách ngăn giữa dụng cụ và mô niêm mạc.

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

Băng gạc trong mũi được dùng để cầm máu, giảm sưng tấy và ngăn ngừa sự kết dính giữa vách ngăn và khoang mũi. Dụng cụ được đặt trong khoang mũi sau khi phẫu thuật hoặc bị chấn thương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chưa có trường hợp chống chỉ định nào được báo cáo. Cần có đánh giá y khoa trước khi sử dụng băng gạc Mũi Xoang RAPID RHINO.

⚠ CẢNH BÁO VÀ KHUYẾN CÁO

Cảnh báo

- Không cố sử dụng sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng đã chỉ định.

Các tác dụng phụ

- Khả năng viêm nhiễm, hoặc chảy máu tái phát và sút băng gạc làm mất tác dụng điều trị.
- Đã có báo cáo về hội chứng sốc nhiễm độc liên quan đến việc sử dụng một số vật liệu băng cầm máu mũi có các thuộc tính hấp thụ chất lỏng. Hội chứng này có thể gây tử vong; vì vậy mọi bệnh nhân cần phải được theo dõi để phòng ngừa bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có diễn biến của hội chứng trên.
- Khó thở có thể xảy ra ở các bệnh nhân nhỏ con hoặc các bệnh nhân có mũi hầu cạn do đặt dụng cụ chưa đúng vị trí.
- Suy hô hấp hoặc giảm oxy có thể xảy ra ở các bệnh nhân có rủi ro bị bệnh đường hô hấp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lấy băng gạc mũi xoang RAPID RHINO ra khỏi bao và đặt vào bát nước vô trùng.
- Nhúng băng vào nước vô trùng trong 30 giây để kích hoạt chất liệu hydrocolloid, KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NƯỚC MUỐI.

- Dùng kẹp forceps gấp băng gạc và nhẹ nhàng đưa vào vị trí mong muốn. Để đảm bảo hiệu quả tối đa, cần chắc chắn rằng băng gạc được đắp lên mô trần.
- Dán dây rút lên má bệnh nhân để đảm bảo rút băng dễ dàng và hạn chế sự dịch chuyển.
- Để rút băng gạc, chỉ cần cầm dây thun và kéo ra nhẹ nhàng.
- Để phòng ngừa hoại tử thứ phát sưng đầu mũi hoặc sưng trụ mũi, không thắt chặt dây rút trên má hoặc xương chóp mũi.
- Cat. # RR 300 và RR 400: rút ra trong vòng 72 giờ.
- Cat. # RR 500 and RR 800 rút ra trong vòng 24 giờ.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Sản phẩm được cung cấp vô trùng, và **CHỈ SỬ DỤNG MỘT LẦN**. Không tẩy rửa, tái khử trùng, hoặc tái sử dụng băng gạc, vì có thể làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến đặc tính của sản phẩm, dẫn đến sai chức năng, bị lỗi hoặc gây tổn thương cho bệnh nhân. Việc tẩy rửa, tái khử trùng hoặc tái sử dụng sản phẩm cũng có thể gây rủi ro lây bệnh truyền nhiễm cho bệnh nhân. Sản phẩm được vô trùng bằng ethylene oxide.

Sản phẩm không sản xuất từ mùn cao su tự nhiên.

TIÊU HỦY

Sản phẩm phải được tiêu hủy theo các quy định hiện hành của chính phủ, và kế hoạch Quản lý Chất thải Y tế áp dụng cho cơ sở.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Thông tin bảo hành

Chất liệu, chức năng và quy cách sản phẩm chỉ được bảo đảm cho một lần sử dụng trên một bệnh nhân. **KHÔNG TÁI SỬ DỤNG. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀY THAY CHO MỌI BẢO HÀNH KHÁC ĐÃ ĐƯỢC NÊU RÕ, ÁM CHỈ, VÀ/HOẶC ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ TƯƠNG ƯNG, VÀ/HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ, VÀ THAY CHO MỌI NGHĨA VỤ HOẶC TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA ARTHROCARE.**

Khiếu nại sản phẩm

Mọi thắc mắc liên quan đến chất lượng, độ tin cậy và/hoặc độ bền của sản phẩm phải được chuyển đến Dịch vụ Khách hàng hoặc một đại diện ủy quyền.

🏢 Nhà sản xuất

ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Điện thoại: +1 (800) 343-5717
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
www.arthrocare.com

📄 Đại diện Ủy quyền tại Châu Âu

Smith & Nephew
York Science Park
Heslington, York YO10 5DF
Vương quốc Anh
Điện thoại: +44 (0) 1926 482400
ec.rep@smith-nephew.com

Đại diện tại Việt Nam

Văn phòng đại diện
Smith & Nephew Pte Ltd.,
Phòng 1335, lầu 13, 39 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

KÝ HIỆU

- REF** Sổ Catalogue
- LOT** Số lô
- Sử dụng trước ngày
- Xem Hướng dẫn Sử dụng
- Không tái sử dụng
- Không tái khử trùng
- Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng
- Bảo quản nơi khô ráo
- Tránh xa ánh nắng mặt trời
- Cẩn trọng
- STERILE EO** Vô trùng bằng Ethylene Oxide

🏢 Nhà sản xuất

EC/REP Đại diện Ủy quyền tại Cộng đồng chung Châu Âu

Rx Only LƯU Ý: Sản phẩm được bán và sử dụng theo đơn của bác sĩ.

CE 0123 Nhân CE và số nhận dạng của Tổ chức Chứng nhận. Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thiết yếu theo Tiêu chuẩn Thiết bị Y tế (93/42/EEC).

*Nhân thương mại của Smith & Nephew. Sản phẩm này có thể có một hoặc nhiều bằng sáng chế Hoa Kỳ. Xem smith-nephew.com/patents để biết thêm chi tiết.

© Smith & Nephew 2015.