



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B5, KCN Tam Điệp, TP Tam Điệp, Ninh Bình

Website: <http://www.mpv.vn> Email: info@mpv.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẶT NẠ THỞ OXY CÓ TÚI

- Gắn đầu ống vào nguồn cấp oxy và cài đặt lưu lượng oxy theo quy định
- Kiểm tra lưu lượng oxy trong toàn bộ thiết bị
- Đặt mặt nạ lên mặt bệnh nhân, dây đeo đàn hồi nằm bên dưới tai và quanh cổ
- Nhẹ nhàng kéo hai đầu của dây đeo cho đến khi mặt nạ được cố định
- Điều chỉnh thanh nẹp kim loại trên mặt nạ cho vừa mũi.

Chú ý:

- Sản phẩm chỉ được sử dụng một lần.
- Không sử dụng khi bao gói bị hở.
- Hủy bỏ sau khi sử dụng theo đúng quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hào