



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: Chất làm đầy da

Chủng loại: Apriline Hydro

Nhà sản xuất: CROMA GmbH (Áo)

Chủ sở hữu: SUISELLE SA (Thụy Sĩ)

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

- Sử dụng dành cho người trưởng thành. Bổ sung sự thiếu hụt axit hyaluronic tự nhiên của cơ thể do lão hóa. Qua đó, cải thiện độ ẩm và đàn hồi cho da, làm đầy các rãnh nông như vết chân chim, đường quanh miệng, căng da tay, cổ

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Mở hộp, bóc niêm phong của hộp đựng xy-lanh chứa filler và kim tiêm
- Giữ phần đầu xy-lanh, vặn nắp đậy và kéo nhẹ.
- Mở nắp đậy của kim tiêm trong hộp đựng
- Lắp kim tiêm vào xy-lanh và vặn theo chiều kim đồng hồ để cố định kim.
- Làm sạch da và tiêm vào dưới da với liều lượng tùy theo chỉ định của bác sĩ
- Sản phẩm được tiêm vào lớp trung bì đến hạ bì sâu và sẽ được tái hấp thụ hoàn toàn bởi cơ thể
- Sau khi tiêm, massage nhẹ vị trí vừa tiêm để điều chỉnh và tán đều vị trí của filler trong da
- Với sản phẩm chất làm đầy không có Lidocaine, có thể ủ tê cho bệnh nhân trước khi thực hiện tiêm để giảm đau hoặc khó chịu trong lúc tiêm filler.

3. BẢO QUẢN VÀ NGÀY HẾT HẠN

- Bảo quản ở nơi khô, thoáng mát (2-25 độ C)
- Sản phẩm này chỉ được sử dụng một lần (cấm sử dụng lại)
- Hạn sử dụng: Xem trên bao bì