

# **KH U TRANG Y T BAYOKA®**

-----oOo-----

## **I/ CÔNG DỤNG**

- Kh u trang y t dùng ng n ng a, b o v các khói b i, mùi khói xe hay các ch t c h i và phòng tránh m t s b nh v hô h p.

## **II/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- Ch s d ng 1 l n
- Kh u trang có 3 n p g p song song nhau.
- Màu s c: màu ( màu theo yêu c u)
- Kích th c:

Chi u dài: 17,5 cm (± 0,5 cm)

Chi u r ng: 9,5 cm (± 0,5 cm)

## **III/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- Kh u trang có 2 m t chúng ta s eo m t màu tr ng eo vào trong, màu xanh n m phía ngoài. Sau khi m c 2 dây vào tai, kéo nh c nh d i xu ng quá c m 1 chút, g ng chì lên trên cánh m i và dùng tay bóp thanh chì sao cho ôm khít vào sóng m i. Dùng ngón cái và tr mi t nh hai bên kh u trang khít vào má.
- V i lo i kh u trang y t ch nên dùng m t l n ho c t i a m t ngày.
- Khi thanh lý nh ng chi c kh u trang y t , b n không c v t b a bãi mà ph i cho vào thùng rác tránh vi khu n có c h i phát tán.

## **IV/ BẢO QUẢN**

- B o qu n n i khô ráo, không có hóa ch t, b i làm nh h ng x u t i ch t l ng s n ph m, không ch ng ch t quá cao gây v .

## **NHÀ SẢN XUẤT**

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIÊN NG M I D CH V TÂN THÁI BÌNH D NG**  
**146 LÒ SIÊU, PH NG 12, QU N 11, TP.HCM, VI T NAM.**

Website: [www.denbayoka.vn](http://www.denbayoka.vn)

Email: [bayoka146148@gmail.com](mailto:bayoka146148@gmail.com)