



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế VTM

Số 129L, phố Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 024 35747145 - 0888666122

Tên trang thiết bị y tế:

- **Xe lăn cho người tàn tật**, Model : LX150 (KJT 802).

Mở xe lăn:

Cầm tay cầm, nhẹ nhàng tách 2 bên khung xe lăn sang 2 phía. Làm phẳng 2 bên gối kê bằng tay. Xe lăn sẽ mở 2 bánh xe sang 2 bên.

Gấp xe lăn:

Đóng bàn tựa chân, nhẹ nhàng nâng chính giữa 2 phần đầu và cuối gối kê. Xe lăn sẽ gấp lại.

Lên hoặc xuống xe lăn:

+ Ngồi lên xe lăn, vui lòng phanh bánh xe lăn trước, giữ tay cầm và ngồi xuống xe lăn 1 cách từ từ.

+ Xuống xe lăn: Phanh bánh xe trước, từ từ đứng lên và rời khỏi xe lăn.

Đẩy và hãm xe lăn: (áp dụng cho người đẩy xe)

Đẩy xe lăn: Đứng đằng sau xe, 2 tay nắm chặt tay nắm, đẩy xe chậm chậm, chú ý phía trước

Hãm xe lăn: Đứng ở cạnh xe lăn, 1 tay giữ tay cầm, 1 tay hãm phanh, khóa phanh hãm (Thực hiện tương tự ở phía còn lại). Luôn khóa phanh xe lăn mỗi khi dừng xe.

Khi lên cầu thang, người chăm sóc nên đẩy xe và đạp lên thanh nghiêng và nhấn tay đẩy xuống để bánh trước được nâng lên bậc thang. Sau đó, kéo tay đẩy lên để nhắc bánh sau lên. Không cố gắng dùng lực để đẩy xe lên bậc thang.

Để di chuyển lên hoặc xuống dốc, người chăm sóc phải luôn ở xung quanh xe lăn để tránh xe bị lật.

Khi xuống dốc, nên xoay xe lại theo hướng lên dốc, ở phía sau xe và xuống từ từ.



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị y tế VTM
Số 129I, phố Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 024 35747145 - 0888666122

Tên trang thiết bị y tế:

- **Xe lăn cho người tàn tật (có phanh tay), Model : LX100 (KJT 802).**

Mở xe lăn:

Cầm tay cầm, nhẹ nhàng tách 2 bên khung xe lăn sang 2 phía. Làm phẳng 2 bên gối kê bằng tay. Xe lăn sẽ mở 2 bánh xe sang 2 bên.

Gấp xe lăn:

Đóng bàn tựa chân, nhẹ nhàng nâng chính giữa 2 phần đầu và cuối gối kê. Xe lăn sẽ gấp lại.

Lên hoặc xuống xe lăn:

+ Ngồi lên xe lăn: Giữ tay phanh và ngồi xuống xe lăn 1 cách từ từ.

+ Xuống xe lăn: Giữ tay phanh, từ từ đứng lên và rời khỏi xe lăn.

Đẩy và hãm xe lăn: (áp dụng cho người đẩy xe)

Đẩy xe lăn: Đứng đằng sau xe, 2 tay nắm chặt tay nắm, đẩy xe chậm chậm, chú ý phía trước

Hãm xe lăn: Đứng đằng sau xe, 2 tay nắm chặt tay nắm và bóp phanh tay. Luôn khóa phanh xe lăn mỗi khi dừng xe.

Khi lên cầu thang, người chăm sóc nên đẩy xe và đạp lên thanh nghiêng và nhấn tay đẩy xuống để bánh trước được nâng lên bậc thang. Sau đó, kéo tay đẩy lên để nhắc bánh sau lên. Không cố gắng dùng lực để đẩy xe lên bậc thang.

Để di chuyển lên hoặc xuống dốc, người chăm sóc phải luôn ở xung quanh xe lăn để tránh xe bị lật.

Khi xuống dốc, nên xoay xe lại theo hướng lên dốc, ở phía sau xe và xuống từ từ.