



3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream

Mô tả Sản phẩm

3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream là một sản phẩm dạng kem cân bằng pH, không gây dị ứng, cung cấp sự bảo vệ da khỏi dịch cơ thể bị rỉ không kiểm soát được.

Kem bảo vệ da bằng cách cung cấp một rào cản kéo dài. Kem cũng có tác dụng dưỡng ẩm và làm mềm da.

Có thể sử dụng các sản phẩm dính vào da khi sử dụng.

Thành phần

Nước (water), diisooctyl adipate, 3M acrylate terpolymer, cocos nucifera (coconut) oil, PPG-15 stearyl ether, glycerin, isopropyl palmitate, mineral oil, trimethylsiloxysilicate, paraffin, dimethicone, phenoxyethanol, benzoic acid, dehydroacetic acid, magnesium sulfate.

Chỉ định sử dụng

3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream bảo vệ vùng da có nguy cơ khỏi các tổn thương liên quan đến mà không kiểm soát được và các triệu chứng có liên quan như ngứa. 3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream cũng có thể được sử dụng để dưỡng ẩm và cải thiện tình trạng da khô. Sản phẩm này an toàn để sử dụng trên cả da nguyên vẹn và da bị tổn thương.

Chống chỉ định

Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Cảnh báo

Chỉ dùng ngoài da. Tránh tiếp xúc với mắt.

Nếu tình trạng không cải thiện sau 7 ngày, hãy tìm sự tư vấn của bác sĩ. Để xa tầm tay trẻ em.

Trong trường hợp nuốt phải, nên tìm sự trợ giúp y tế.

Tránh sử dụng cho những trường hợp bị dị ứng và mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào được liệt kê của sản phẩm.

3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream không phải là sản phẩm để điều trị các bệnh thuộc đường hậu môn.

Thận trọng

3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream có thể làm tang độ dính của các sản phẩm dính trên da. Sử dụng các sản phẩm bôi da khác như thuốc mỡ, kem hoặc kem dưỡng da có thể làm giảm đáng kể hiệu quả của nó.

Cách dùng

Rửa sạch da. Bôi 3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream trên toàn vùng da có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Bôi lại nếu thấy cần. Nếu cảm giác nhờn, có thể bạn đã dùng một lượng sản phẩm quá nhiều.

Bảo quản / Sử dụng

Để có kết quả tốt nhất, nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Hạn sử dụng, tham khảo ngày hết hạn trên mỗi gói. Thông thường hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày sản xuất nếu sản phẩm được bảo quản trong điều kiện được khuyến cáo – nhiệt độ phòng.

Quy cách đóng gói

Cat. No.	Kích cỡ	Quy cách
3391G	Tuýp 28g	Hộp 1 tuýp
3392G	Tuýp 92g	Hộp 1 tuýp
3392GS	Gói 2g	Hộp 20 gói

Nhà sản xuất

3M Health Care Ltd
Derby Road, Loughborough LE11 5SF,
United Kingdom

Chủ sở hữu lưu hành tại Việt Nam

Công ty TNHH 3M Việt Nam,
77 Hoàng Văn Thái,
P. Tân Phú, Q.7,
TP.HCM

Nhập khẩu, phân phối

Công ty TNHH 3M Việt Nam,
77 Hoàng Văn Thái,
P. Tân Phú, Q.7,
TP.HCM