




# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG


Model: Vertica, Seta, Evario, Puro, Sicuro Pesa; Maximo

## 1. Điều khiển giường bằng bộ điều khiển bằng tay

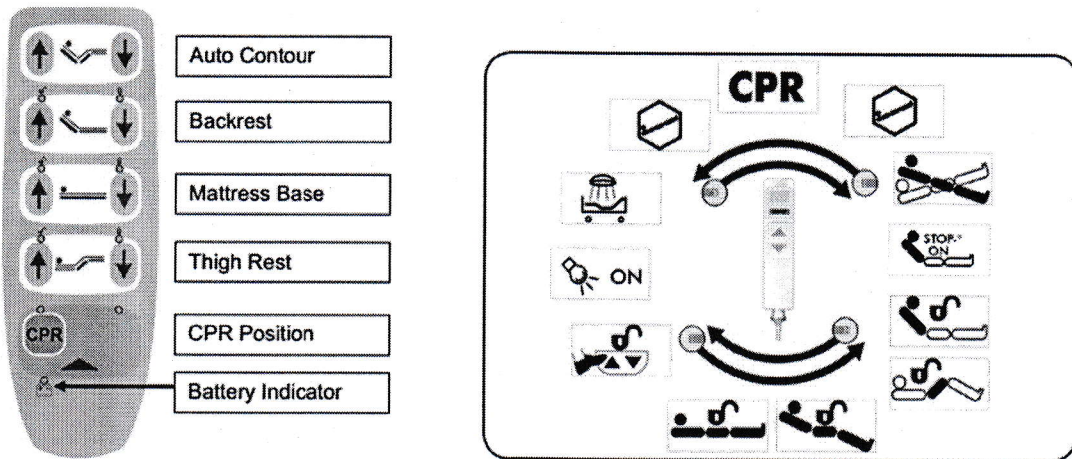



- Ấn phím  để tiến hành nâng cao các bộ phận giường (phần lưng, đùi, chiều cao giường,...)
- Ấn phím  để tiến hành hạ thấp các bộ phận giường (phần lưng, đùi, chiều cao giường,...)


## 2. Điều khiển giường bằng bộ điều khiển trên tay vịn

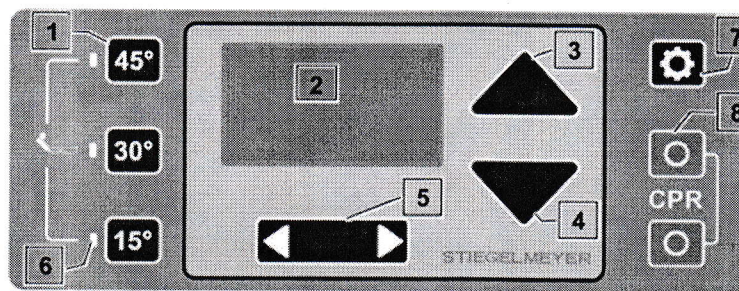

- Ấn phím số 5 để lựa chọn các tính năng muốn điều chỉnh và nó sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị số 2
- Để nâng cao hay hạ thấp các tính năng đó, ấn phím 3 hoặc 4.



## 3. Điều khiển giường bằng hộp điều khiển dưới chân giường

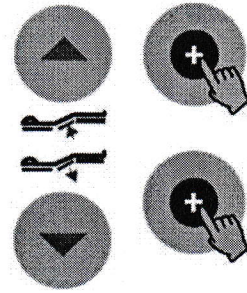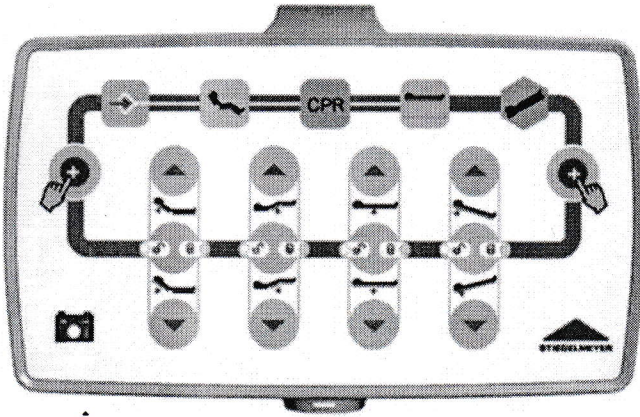

- Ấn đồng thời phím  cùng các phím chức năng để điều khiển chức năng của giường.

#### 4. Gắn thêm các phụ kiện



##### 4.1. Tấm đầu/ chân giường

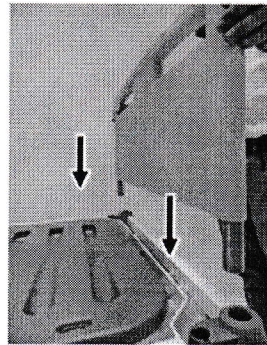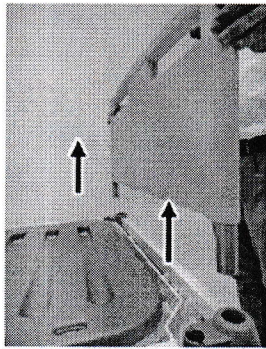

Tấm đầu/ chân giường có thể được tháo ra/ lắp vào một cách dễ dàng.



##### 4.2. Cọc truyền

Bên trong tấm đầu/ chân giường sẽ có 2 vị trí giúp gắn cọc truyền

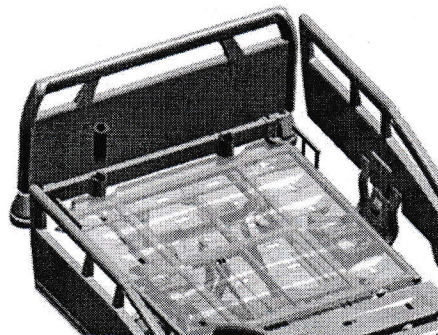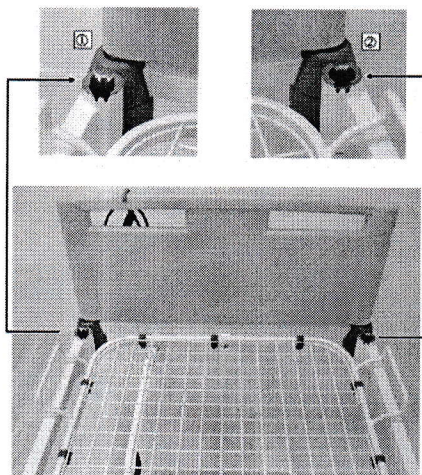

### 4.3. Túi đựng nước tiểu

Ở phía dưới phần tay vịn sẽ là vị trí để treo túi đựng nước tiểu ( treo vào các móc)

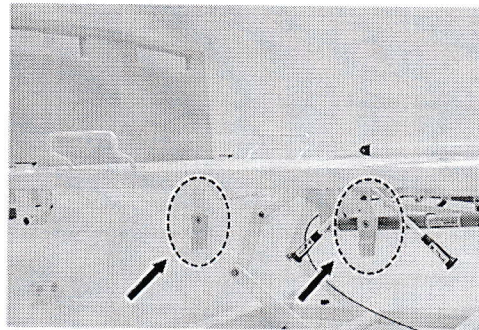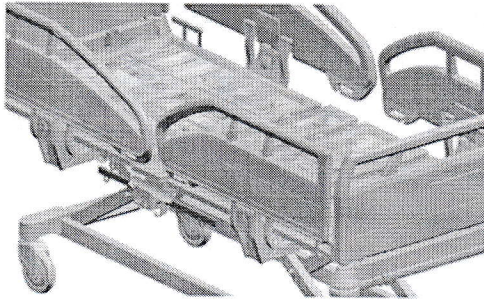

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Trung Đức*