

Đức Tân

ISO 9001:2015



CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC TÂN

Địa chỉ ĐKKD : 228 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP. HCM
 VPGD & PX SX 1 : 280 -282 Phan Anh, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP. HCM
 P.Xưởng SX 2 : 305 Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP. HCM
 ĐT : (028) 39613718/ 39611458 FAX : (028) 39651082

THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - BỒN NƯỚC INOX - MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

<p>Giường inox đặc dụng</p>	<p>Bước 1: Lắp giường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho thân giường vào chân trên thân giường có 4 thanh liên kết với chân giường ở bốn góc thân - Ổ chân giường có lỗ khớp với thanh liên kết trên thân; cho lỗ chân khớp vào thân rồi ấn mạnh xuống là nó ăn với nhau <p><i>lưu ý: chân giường có một đầu thấp, một đầu cao, lắp đầu thấp vào phía tay quay gần trên thân.</i></p> <p>Bước 2: Lắp các phụ kiện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp cọc màn <p><i>lưu ý cọc màn ấn theo chân, cọc dài đi theo chân dài, cọc ngắn đi theo chân ngắn</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp thành bên - Thành bên của giường Inox dùng để giữ cho người bệnh không bị ngã khi nằm trên giường - Khi lắp thì đẩy thành bên vào giữa các móc trên thân giường rồi ấn mạnh cho nó vào khớp rồi quay lên trên hướng mặt giường <p>Bước 3: cho đệm lên mặt giường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bạn nên mua đệm dùng cho giường inox 2 tay quay. - Đệm được thiết kế có các phần gấp theo thiết kế của giường quay gấp - Trái đệm khớp với các khúc gấp của giường <p>Khi lắp xong có thể dùng và quay thử các tay quay để kiểm lại giường</p>
<p>Giường inox đơn</p>	<p>Bước 1: Lắp giường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho thân giường vào chân trên thân giường có 4 thanh liên kết với chân giường ở bốn góc thân - Ổ chân giường có lỗ khớp với thanh liên kết trên thân; cho lỗ chân khớp vào thân rồi ấn mạnh xuống là nó ăn với nhau <p><i>lưu ý: chân giường có một đầu thấp, một đầu cao,</i></p> <p>Bước 2: Lắp các phụ kiện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp cọc màn



	<p><i>lưu ý cọc màn ăn theo chân, cọc dài đi theo chân dài, cọc ngắn đi theo chân ngắn</i></p> <p>Bước 3: cho đệm lên mặt giường</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trải đệm khớp với các khúc gấp của nâng đầu giường
Xe đẩy oxy 6 khối	<ul style="list-style-type: none"> - Xe đẩy bình oxy được sản xuất bằng inox 201 chuyên dùng để đẩy bình oxy từ nơi này sang nơi khác - Bình oxy khi để trên khung xe đẩy được bảo vệ với khóa dây xích để tránh bình rơi ra khi vận chuyển - Xe đẩy bình oxy được sử dụng 2 bánh xe chính với đường kính 125 mm và 1 bánh xe phụ đường kính 70 mm giúp xe đẩy tạo thế 3 chân và có thể xếp gọn bánh xe phụ khi không cần thiết
Xe đẩy oxy 3 khối	<ul style="list-style-type: none"> - Xe đẩy bình oxy được sản xuất bằng inox 201 chuyên dùng để đẩy bình oxy từ nơi này sang nơi khác - Bình oxy khi để trên khung xe đẩy được bảo vệ với khóa dây xích để tránh bình rơi ra khi vận chuyển - Xe đẩy bình oxy được sử dụng 2 bánh xe với đường kính 100 mm - Sử dụng mặt bích vuông có tiết diện vừa đủ cho bình oxy vào an toàn
Xe đẩy băng ca	<ul style="list-style-type: none"> - Băng ca đẩy inox có bánh xe là loại dụng cụ dùng để di chuyển bệnh nhân - Đây là một loại xe đơn giản có thể dùng để khiêng người hoặc đẩy người đến xe cấp cứu - Băng ca có thể tháo rời trong trường hợp nơi cấp cứu cả xe băng ca không thể đẩy vào được - Vay hai bên xe băng ca có thể đóng mở ngăn bệnh nhân khỏi ngã ra ngoài - Cây dịch truyền kèm theo xe băng ca được cố định bằng núm vặn có thể tăng giảm chiều cao của cây dịch truyền - có 4 bánh xe có thể di chuyển dễ dàng - Nệm băng ca có kích thước phù hợp với mặt xe băng ca
Tủ đựng thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Tủ đựng thuốc có ngăn độc AB là sản phẩm chuyên dùng cho ngành y tế được sử dụng bằng inox và kính có ổ khóa - Tủ được chia thành 2 phần riêng biệt. - Phần trên: Ngăn đầu tiên trên cùng là 2 tủ nhỏ AB làm bằng inox có khóa để chứa nhóm dược liệu chất nhóm AB Ngăn 2 được làm bằng tấm kính 5 ly bất trên khung 12 x 12, tấm kính được lắp vào như 1 kệ chứa thuốc Ngăn 3 là 1 sản inox - Phần dưới: Được chia thành 2 ngăn bởi 1 tấm inox lửng ở giữa, xung quanh được

029622
CÔNG TY
NHỆM HỮU
ĐỨC TÀI
TỔNG CÁN

	<p>bao bọc bởi inox có khóa</p> <p>- Cánh tủ ngăn trên và ngăn dưới có sử dụng khóa giúp bảo quản thuốc an toàn</p>
Khay đựng dụng cụ 300 x 400 x 20 mm	Dùng để đựng kim, kéo, kẹp ...
Khay đựng dụng cụ 170 x 220 x 20 mm	Dùng để đựng kim, kéo, kẹp ...
Khay hạt đậu	Dùng để đựng bông tẩm cồn trong quá trình tiêm chích thuốc
Cây treo dịch truyền	<p>- Cây treo truyền dịch được chia thành 2 phần và có thể dịch chuyển bằng núm vặn mở hoặc khóa</p> <p>- Khung giá đỡ vững chắc có 4 thanh bất chéo góc sử dụng phương pháp hàn Argon, có 4 bánh xe đẩy có khóa</p> <p>- Phần đầu của cây dịch truyền được chia làm 4 nhánh có móc đỡ</p>
Hộp inox lưu mẫu	Dùng để đựng bông gòn
Hộp đựng dụng cụ hấp y tế	Dùng để đựng dụng cụ hấp tiệt trùng

