

ĐÈN TIÊU PHỔ BAYOKA®

-----oOo-----

I/ CÔNG DỤNG Đèn tiêu phổ dùng để chiếu sáng trong phổ thu. Đèn tiêu phổ gồm 02 loại
nhỏ : Đèn tiêu phổ công nghệ Led, công nghệ Halogen.

II/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bóng HALOGEN hoặc Bóng LED (12v, 24v)
- Công suất đèn tùy theo loại bóng từ 5 w đến 40 w
- Chóa đèn phân quang hẹp hoặc rộng
- Có đế xoay linh động 360°
- Điện áp 220VAC - Tần số 50Hz
- Chân đế bằng gang, thân đèn inox, khóa vít.
- Chiều cao tăng giảm chiếu sáng từ 0,95m - 1,7m.

III/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN

- Kiểm tra sản phẩm và các bộ phận trước khi lắp đặt.
- Cắm dây nguồn vào ổ điện 220v, phích cắm phải sát vào ổ cắm không gây tia lửa.
- Bật công tắc.
- Không sờ động nguồn điện quá lâu.
- Rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện sau khi sử dụng.
- Không rút phích cắm điện khi tay đang ướt.
- Trước khi vệ sinh sản phẩm phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.
- Tránh ra tay trẻ em

VI/ THÔNG TIN BẢO HÀNH

- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua.
- Bóng đèn không bảo hành
- Trong thời gian bảo hành, sản phẩm được sửa chữa hoàn toàn miễn phí nếu hỏng do lỗi nhà sản xuất.
- Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành miễn phí :
 - ✓ Sản phẩm hỏng do thiên tai, tai nạn bất cẩn, hay do cách sử dụng sản phẩm sai hướng dẫn, sửa chữa bởi người khác ..v.v..
 - ✓ Tem bảo hành dán trên sản phẩm không còn nguyên vẹn

V/ BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, không có hóa chất, bụi làm ảnh hưởng xấu tới chất lượng sản phẩm, không chạm quá cao gây đổ vỡ.

NHÀ SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT KẾ MÔI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH ĐÔNG

146 LÒ SIÊU, PHƯỜNG NG 12, QUẬN 11, TP.HCM, VIỆT NAM.

Website: **www.denbayoka.vn**

Email: bayoka146148@gmail.com