

D NG C HÚT M I BAYOKA®

-----oOo-----

I/ CÔNG DỤNG

- Dùng hút nước m i

II/ THÀNH PHẦN

- Nhựa PP, PS & ABS chính phẩm.
- Ống PVC
- Quả bóp cao su

III/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Trước khi sử dụng, ngâm khoảng 3 - 5 phút trong nước sôi.
- Bé nằm trên giường cao, hoặc bé nằm nghiêng cho bé khó chịu, sau đó dùng chai nhúng trực tiếp dung dịch nước muối sinh lý vào mũi bé làm mềm và lỏng các chất nhầy; hút mũi, lấy giấy lau sạch mũi hút rồi tiếp tục vì bên còn lại.
- Sau khi sử dụng, rửa sạch và phơi khô ráo, thoáng mát.

IV/ BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, không có hóa chất, bụi làm nhũn hoặc xuất hiện tiếng nổ phẩm, không chứa chất quá cao gây vỡ.

NHÀ SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT KẾ M I D CH V TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG

146 LÒ SIÊU, PHƯỜNG 12, QUẬN 11, TP.HCM, VIỆT NAM.

Website: www.denbayoka.vn

Email: bayoka146148@gmail.com