

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY CHIẾU BẢNG THỊ LỰC

GIỚI THIỆU: Máy chiếu thị lực điện tử Model ACP 700 của Unicos, sản xuất tại Hàn Quốc:

- + Chiếu bảng thị lực rõ ràng và chính xác với 4 kiểu bảng khác nhau A/B/C/M
- Số lượng bảng chiếu: 31 , Tốc độ chọn bảng: 0,3 giây , Ánh sáng lọc: Đỏ/Xanh
- Khoảng cách chiếu: 2m đến 7 m (lý tưởng 3m) , Độ phóng đại: 30 lần ở khoảng cách 5 m
- Kích thước chiếu: 252mm và 330W x 225 H tại 5 m
- Góc chiếu: +/- 100, Đèn chiếu: 6V, 20W hallogen , Tự động tắt mở: 5-10 phút
- Điện tiêu thụ: 80 VA , Dòng điện: AC 100 -240 V, 50/60 Hz
- Kích cỡ máy: 230 (W) x 360 (D) x 265 (H)

Hướng dẫn sử dụng:

- Treo bảng chiếu nhôm lên tường với chiều cao khoảng 1,5 m.
- Đặt máy lên bàn đổi diện với tường có treo bảng chiếu nhôm Khoảng cách giữa máy và tường từ 2- 7 m, lý tưởng đặt 3 m
- Bật máy căn chỉnh nút nâng hạ của máy để màn hình chiếu rơi chọn vào bảng chiếu nhôm trên tường
- Bệnh nhân đứng cách xa tường 3 m, góc nhìn 150
- Bệnh nhân dùng mắt kính thử từng mắt theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên hoặc bác sĩ.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



*Giám đốc
Nguyễn Bá Nghị*