


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO SẢN PHẨM

MARIMER, BABY NASAL ASPIRATOR

HÃNG SẢN XUẤT: LABORATOIRES GILBERT

NƯỚC SẢN XUẤT: PHÁP

1. **Cấu tạo của thiết bị “Marimer baby nasal aspirator”:** dụng cụ hút dịch mũi cho trẻ em hiệu Marimer có 6 bộ phận như hình vẽ bên dưới:

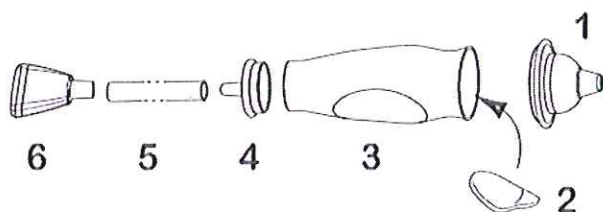

- 1 - Nasal nozzle
- 2 - Cotton*
- 3 - Reservoir
- 4 - Tube adaptor
- 5 - Tube
- 6 - Mouth piece

2. Hướng dẫn sử dụng:

- Bước 1: chuẩn bị dụng cụ hút dịch mũi trẻ em: Ở bước này bạn cần rửa sạch tay; sau đó lắp dụng cụ theo như chỉ dẫn của hình vẽ trên và đặt một miếng bông (số 2-Cotton), có tác dụng như một cái lọc giữa đầu hút dịch mũi (số 1 – Nasal nozzle) và phần bụng chứa dịch nhờn của dụng cụ (số 3- Reservoir).
- Bước 2: chuẩn bị đối với bé:
 - Đặt bé nằm trên bàn thay đồ hoặc giường, giữ đầu bé hơi cao một chút so với bàn thay đồ hoặc giường.
 - Đặt đuôi số 6 (Mouth Piece) vào miệng của bạn, mép nhỏ sẽ giúp giữ phần “Mouth Piece” luôn cố định giữa hai hàm răng.
 - Nhẹ nhàng cho đầu số 1 (Nasal nozzle) vào một trong 1 lỗ mũi của đứa bé.
 - Hút nhẹ nhàng. Dịch nhờn sẽ chứa đầy phần bụng chứa dịch nhờn số 3-Reservoir.
 - Lặp lại thường xuyên nếu cần thiết.
 - Lặp lại với lỗ mũi còn lại.
- Bước 3: sau khi sử dụng dụng cụ
 - Sau khi sử dụng dụng cụ, tháo rời các phần.
 - Loại bỏ miếng bông (2-cotton) đã sử dụng.
 - Làm sạch dụng cụ bằng nước xà bông, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Lưu ý: không được đặt dụng cụ trực tiếp vào nước sôi.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Thanh Thủy