



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B5, KCN Tam Điệp, TP Tam Điệp, Ninh Bình

Website: <http://www.mpv.vn> Email: info@mpv.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÚI CHO ĂN

Tên sản phẩm: Túi cho ăn.


Chủng loại: 500 ml, 1000 ml, 1200 ml, 1500 ml.

Mục đích sử dụng: Dùng truyền thức ăn cho bệnh nhân không thể tự ăn uống được.

Hướng dẫn sử dụng:

- Rửa tay sát khuẩn sau đó xé bỏ túi nilong đựng ngoài túi.
- Khóa chặt van điều chỉnh.
- Đổ dung dịch cần cho ăn vào túi chứa.
- Đậy nắp và treo túi lên móc treo.
- Thêm đá lạnh vào ngăn chứa đá nếu cần.
- Mở van điều chỉnh cho dung dịch chảy vào ống dây, sau đó khóa chặt van điều chỉnh.
- Kết nối bộ cho ăn với ống cho ăn đường ruột của bệnh nhân.
- Mở van và điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt, bắt đầu quá trình cho ăn.

Cảnh báo và thận trọng:

- Kiểm tra bao bì sản phẩm phải còn nguyên vẹn trước khi sử dụng. Nếu phát hiện bao bì hở, có dấu hiệu rò rỉ và hư hỏng, tuyệt đối không được sử dụng sản phẩm vì không đảm bảo độ vô trùng.
- Sản phẩm đã được khử trùng bằng EO và phải được sử dụng ngay sau khi mở lớp đóng gói.
- Chỉ sử dụng sản phẩm khi hạn sử dụng còn hiệu lực.
- Sản phẩm này chỉ sử dụng duy nhất một lần, không được tái sử dụng.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
- Chỉ được sử dụng bởi người có chuyên môn y tế. 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hải