

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG STERRAD™ 100NX



- BƯỚC 1** **Mở nguồn - Bật I/O**
(chờ cho màn hình khởi động xong)
- BƯỚC 2** **Chạm vào màn hình để đăng nhập**
(Log in bằng user & password đã được cung cấp)
- BƯỚC 3** **Mở cửa (open door) đưa dụng cụ vào**
(Dụng cụ sau khi xử lý & đóng gói đúng quy cách)
- BƯỚC 4** **Đóng cửa (close door)**
- BƯỚC 5** **Chọn chu kỳ STANDARD/ FLEX phù hợp**
- BƯỚC 6** **Chờ chu kỳ hoàn tất, màn hình hiện màu xanh lá cây, mở cửa và lấy dụng cụ ra**

ASP™ Advanced Sterilization Products

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 11, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG STERRAD™ 100NX

- BƯỚC 1** Mở nguồn - Bật I/O
- BƯỚC 2** Chạm vào màn hình để đăng nhập (Log in bằng user & password đã được cung cấp)
- BƯỚC 3** Mở cửa (open door) đưa dụng cụ vào (Dụng cụ sau khi xử lý & đóng gói đúng quy cách)
- BƯỚC 4** Đóng cửa (close door)
- BƯỚC 5** Chọn chu kỳ STANDARD/ FLEX phù hợp
- BƯỚC 6** Chờ chu kỳ hoàn tất, màn hình hiện màu xanh lá cây, mở cửa và lấy dụng cụ ra

ASP™ Advanced Sterilization Products

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 11, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG STERRAD™ 100S

- BƯỚC 1** Mở nguồn (khoảng 15 phút)
“READY TO USE”
- BƯỚC 2** Mở cửa (OPEN DOOR) đưa dụng cụ vào
(Dụng cụ sau khi xử lý & đóng gói đúng quy cách)
- BƯỚC 3** Đóng cửa (CLOSE DOOR)
- BƯỚC 4** Chọn chu kỳ SHORT/LONG phù hợp
 - ▶ **SHORT CYCLE**
YES (bấm START) – NO (bấm CANCEL)
 - ▶ **LONG CYCLE**
YES (bấm START) – NO (bấm CANCEL)
- BƯỚC 5** Chờ chu kỳ hoàn tất,
mở cửa và lấy dụng cụ ra

ASP™ Advanced Sterilization Products

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 11, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG STERRAD NX™



- BƯỚC 1** Mở nguồn - Bật I/O
- BƯỚC 2** Chạm vào màn hình để khởi động
(Log in bằng user & password đã được cung cấp)
- BƯỚC 3** Mở cửa (open door) đưa dụng cụ vào
(Dụng cụ sau khi xử lý & đóng gói đúng quy cách)
- BƯỚC 4** Đóng cửa (close door)
- BƯỚC 5** Chọn chu kỳ STANDARD/ ADVANCED phù hợp
- BƯỚC 6** Chờ chu kỳ hoàn tất, màn hình hiện màu
xanh lá cây, mở cửa và lấy dụng cụ ra

ASP™ Advanced
Sterilization
Products

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 11, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG STERRAD NX™



- BƯỚC 1** **Mở nguồn - Bật I/O**
(chờ cho màn hình khởi động xong)
- BƯỚC 2** **Chạm vào màn hình để khởi động**
(Log in bằng user & password đã được cung cấp)
- BƯỚC 3** **Mở cửa (open door) đưa dụng cụ vào**
(Dụng cụ sau khi xử lý & đóng gói đúng quy cách)
- BƯỚC 4** **Đóng cửa (close door)**
- BƯỚC 5** **Chọn chu kỳ STANDARD/ ADVANCED phù hợp**
- BƯỚC 6** **Chờ chu kỳ hoàn tất, màn hình hiện màu xanh lá cây, mở cửa và lấy dụng cụ ra**

ASP™ Advanced
Sterilization
Products

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 11, Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam