

Thiết bị y tế

Golanil SPRAY ORALE

Xịt họng từ thảo dược chuẩn hóa châu Âu
giúp Giảm ho - Thông họng tức thì



Mô tả: Golanil Spray Orale dạng xịt là một thiết bị y tế theo Chi thị 93/42/EEC. Sản phẩm thơm mùi tinh dầu, vị ngọt, giúp bảo vệ cổ họng khỏi các tác nhân kích thích từ bên ngoài: khói bụi, thuốc lá, hóa chất ô nhiễm, vi khuẩn, virus..., làm giảm các triệu chứng khô họng, nóng rát họng, đau họng, ho, khàn giọng, khó nuốt, chảy máu chân răng, nhiệt miệng.

Thành phần

Dịch chiết Keo ong (*Propolis*), dịch chiết Xô thơm (*Salvia officinalis*), dịch chiết gel Lô hội (*Aloe barbadensis*), dịch chiết Myrrh (*Commiphora myrrha*), dịch chiết Sơ ri – Acerola (*Malpighia glabra*) chứa 25% Vitamin C, tinh dầu Xô thơm (*Salvia officinalis*), tinh dầu Bạc hà Âu (*Mentha piperita*), tinh dầu Cỏ xạ hương (*Thymus vulgaris*).

Phụ liệu: nước khử khoáng, potassium sorbate, acid citric, sucralose, polyvinylpyrrolidone, gồm xanthan. Không Gluten.

Công dụng

Giúp tạo lớp màng dính muco với “hiệu ứng hàng rào” có tác động bảo vệ cổ họng, làm giảm các triệu chứng khô họng, nóng rát họng, đau họng, ho, khàn giọng, khó nuốt, chảy máu chân răng, nhiệt miệng.

Giảm nhanh triệu chứng ho, nóng rát họng. Tạo cảm giác mát họng nhờ tinh dầu.

Bảo vệ niêm mạc hầu họng làm giảm sự nhạy cảm với các tác nhân tấn công bên ngoài, đặc biệt là trong những trường hợp tiếp xúc với môi trường không tốt cho cổ họng.

Cách dùng

Lắc kỹ trước khi dùng.

Xịt 3-4 lần/ngày, mỗi lần xịt 3-4 liều. Có thể xịt nhiều lần hơn tùy thuộc vào mức độ nặng, mức độ tổn thương niêm mạc đường hô hấp, khoang miệng. Có thể dùng độc lập hoặc sử dụng kết hợp với các thuốc điều trị bệnh.

Cảnh báo

Không sử dụng cho người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Chai thủy tinh với nắp xịt dạng nhựa. Trước khi sử dụng phải chắc chắn nắp xịt gắn chắc vào chai.

Đóng gói: Hộp 1 chai 30ml dạng xịt.

Bảo quản

Giữ ở nơi khô ráo, tránh nhiệt độ cao và ánh sáng trực tiếp. Giữ xa tầm tay trẻ em.

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. HSD in trên bao bì sản phẩm. NSX là HSD trừ đi 3 năm.

Số lô: Số lô in trên bao bì sản phẩm.

Hãng sản xuất: Pharmalife Research s.r.l.

Pharmalife Research s.r.l. Via Casa Paradiso 2/A, 23846 Garbagnate Monastero (LC) – Italia
Pharmalife Research s.r.l sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, được quy định tại luật số 21 Bộ luật Liên bang – Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Italy. Nhà máy sản xuất đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, ISO 22000.

Tên và địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP

Trụ sở chính: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

VP giao dịch: Tầng 6, Tòa nhà Viwaseen, số 48, Phố Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Hotline: **1800 8070** Website: **www.delap.vn**

Số lưu hành trang thiết bị y tế: 180001074/PCBA-HN

