

THIẾT BỊ Y TẾ

XỊT MŨI Smartbibi NASAL



LÀM SẠCH KHOANG MŨI - CHỐNG VIÊM - LÀM DỊU NIÊM MẠC MŨI

SMARTBIBI NASAL là thiết bị y tế được sản xuất theo các tiêu chuẩn của hướng dẫn 93/42/CEE. Sản phẩm thơm mùi tinh dầu, giúp hỗ trợ làm sạch mũi, chống viêm, bảo vệ niêm mạc mũi khỏi các tác nhân kích thích từ bên ngoài: khói bụi, hoá chất ô nhiễm, vi khuẩn, virus,... và làm thông thoáng đường thở trong các trường hợp bị cảm lạnh hoặc dị ứng.

THÀNH PHẦN

Nước, natri hyaluronat, natri chloride, nước cất cô xạ hương, kali monophosphate kali biphosphate, kali sorbate.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Chai 15ml có vòi xịt.

CÔNG DỤNG:

SMARTBIBI NASAL là một thiết bị xịt mũi chứa dung dịch muối ưu trương 3%, acid hyaluronic và nước cất cô xạ hương.

SMARTBIBI NASAL có tác dụng làm thông thoáng màng nhầy mũi và làm loãng dịch mũi. Sản phẩm giúp làm tăng tính lưu động của nước mũi, do đó giúp làm sạch mũi, đặc biệt trong các trường hợp cảm lạnh, viêm mũi dị ứng, viêm mũi họng, viêm xoang.

Dung dịch muối ưu trương 3% giúp sát khuẩn, chống viêm, chống phù nề.

Acid hyaluronic giúp giữ ẩm, làm dịu niêm mạc mũi bị kích ứng.

Có thể dùng sau phẫu thuật khoang mũi, hoặc trong các trường hợp viêm mũi, viêm hầu họng cấp.

CÁCH DÙNG:

Lắc trước khi dùng. Lần sử dụng đầu tiên sau thời gian dài không dùng cần xịt vài lần để sản phẩm phân tán đều. Ấn 2 ngón tay vào cạnh vòi xịt để xịt.

- Trẻ em từ 2 đến 3 tuổi: tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.
- Trẻ em từ 3 đến 12 tuổi: 1 lần xịt mỗi bên mũi, có thể xịt tới 3 lần/ngày.
- Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: xịt 1 hoặc 2 lần mỗi bên mũi, có thể dùng tới 4 lần/ngày.





CHÚ Ý

Không dùng cho người mẫn cảm hoặc dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Không xịt vào mắt. Không dùng khi sản phẩm bị mở nắp hoặc vỡ. Chưa phát hiện có tương tác thuốc. Trong trường hợp gặp tác dụng không mong muốn, dùng sử dụng, hỏi ý kiến bác sỹ và thông báo với nhà sản xuất.

Nếu các triệu chứng không đỡ sau 3 – 5 ngày, tham khảo ý kiến bác sỹ.

Trẻ em phải dùng dưới sự giám sát của người lớn.

Phụ nữ có thai hoặc cho con bú chỉ dùng khi có sự giám sát y tế.

Sản phẩm không chứa chất làm co mạch, không làm khô niêm mạc mũi và không gây nghiện, do đó sản phẩm thích hợp để dùng cả ngày.

BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô, mát. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh sáng. Để xa tầm tay trẻ em.

HẠN SỬ DỤNG:

Số lô và hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm.

Hạn sử dụng tương ứng với sản phẩm bảo quản đúng cách và chưa mở nắp. Sau khi mở nắp, sử dụng trong vòng 1 tháng.

Xuất xứ: Italy

Sản xuất tại: Gricar Chemical s.r.l

Địa chỉ: Via San Giuseppe 18/20, 20861 Brugherio (MB) – Ý (Italia).

Tên và địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP

Trụ sở chính: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

VP giao dịch: Tầng 6, Tòa nhà Viwaseen, số 48, Phố Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Hotline: 1800 1104 Website: www.smartbibi.vn

Số lưu hành trang thiết bị y tế: 210000768/PC-BA-HN

