



Máy Đo Huyết Áp Tự Động HEM-7361T

★★★★★ Overall rating : 5/5 | 8 Đánh giá

Omron HEM-7361T đo và phát hiện huyết áp và rung tâm nhĩ (AFIB) cùng một lúc. Kiểm tra kép cho 2 người dùng giúp người dùng kiểm tra toàn diện về nguy cơ đột quỵ với một thiết bị, trong một lần đo. Được thiết kế dành cho gia đình, chức năng 2 người dùng cho phép lưu trữ và truyền dữ liệu kết quả đo của 2 người dùng riêng biệt sang điện thoại thông minh của họ.

2.950.000 VND*

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế.

- Thông tin tổng quan
- Điểm nổi bật của sản phẩm
- Afib là gì?
- Sử dụng như thế nào?
- Kết nối OMRON
- Phụ kiện tùy chọn
- Hỗ trợ
- Đánh giá

Video



+ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LÂM SÀNG

Đặc tính kỹ thuật

AFIB [Bảo AFIB \(rung tâm nhĩ\)](#)

Vòng bít ° Intelliwrap™ 360° chính xác

Đèn hướng dẫn quấn vòng bít

Báo cử động người trong khi đo

Phát hiện nhịp tim bất thường

Chỉ báo tăng huyết áp

Công nghệ IntelliSense



Chỉ số trung bình của 3 lần đo cuối cùng trong vòng 10 phút

2 người dùng X 100 dữ liệu đo trong bộ nhớ

[Ứng dụng Omron connect](#) giúp bạn dễ dàng lưu, theo dõi và quản lý dữ liệu sức khỏe của mình ở mọi nơi.

- [Nhật ký huyết áp](#) được thiết kế đặc biệt để quản lý sức khỏe huyết áp của bạn
- [HealthGift](#) thưởng cho các phép đo thường xuyên của bạn.
- Xem [danh sách các thiết bị thông minh](#) được hỗ trợ trước khi mua

Bluetooth® Kết nối



Số công bố 220000154/PCBB-BYT

Có sở công bố: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Chăm sóc tại nhà	Chuyên nghiệp	Sự kiện / Khuyến mãi	Giới thiệu	Hỗ trợ
Tầm nhìn Gen Zero Theo dõi huyết áp Trị liệu hô hấp Đo nhiệt độ Quản lý cân nặng Trị liệu giảm đau	Theo dõi huyết áp Trị liệu hô hấp Đo nhiệt độ Sàng lọc không xâm lấn	Thông báo Chương trình khuyến mãi Cầm nang sức khỏe	Dịch vụ của chúng tôi Nghề nghiệp Công nghệ Nhà máy Môi trường	Đăng ký bảo hành Hướng dẫn sử dụng Câu hỏi thường gặp Địa điểm mua hàng Chăm sóc khách hàng Chính sách bảo mật Điều khoản sử dụng
Kết nối với chúng tôi				
Số đăng trang web Bản quyền năm 2022 thuộc về Omron Healthcare Asia. Bảo lưu mọi quyền.				

Điền số = Chọn sản tại nhà = Theo dõi huyết áp = Bắp tay = HEM-7361T



Máy Đo Huyết Áp Tự Động HEM-7361T

★★★★★ Overall rating : 5/5 | 8 Đánh giá

Omron HEM-7361T đo và phát hiện huyết áp và rung tâm nhĩ (AFIB) cùng một lúc. Kiểm tra kép cho 2 người dùng giúp người dùng kiểm tra toàn diện về nguy cơ đột quỵ với một thiết bị, trong một lần đo. Được thiết kế dành cho gia đình, chức năng 2 người dùng cho phép lưu trữ và truyền dữ liệu kết quả đo của 2 người dùng riêng biệt sang điện thoại thông minh của họ.

2.950.000 VND*

* Giá bán lẻ để xuất đã bao gồm thuế.

- Thông tin tổng quan

Điểm nổi bật của sản phẩm

AFib là gì?

Sử dụng như thế nào?

Kết nối OMRON
- Phụ kiện tùy chọn

Hỗ trợ

Đánh giá



HIỂU BIẾT VỀ NHỊP TIM KHÔNG ĐỀU & AFIB



AFIB LÀ GÌ?

Rung tâm nhĩ (còn gọi là Afib hoặc AF) là hiện tượng nhịp tim không đều (IHB hoặc rối loạn nhịp tim) có thể dẫn đến đông máu, đột quỵ, suy tim và các biến chứng liên quan đến tim khác. Trong quá trình Afib, hai ngăn trên (tâm nhĩ) đập loạn xạ và không đều, không phối hợp nhịp nhàng với hai ngăn dưới (tâm thất).

Các đợt Afib có thể đến rồi tự biến mất, hoặc tình trạng Afib có thể tiến triển, không biến mất mà cần phải điều trị. Nguy cơ của Afib lên tình trạng sức khỏe về lâu dài là rất nghiêm trọng. Do đó, việc phối hợp với bác sĩ để kiểm soát tình trạng này là rất quan trọng.

Điều trị bao gồm dùng thuốc theo đơn và thực hiện những thay đổi cần thiết về lối sống, nhằm giảm nguy cơ xảy ra biến chứng liên quan đến Afib như đột quỵ.



NHỊP TIM KHÔNG ĐỀU (RỐI LOẠN NHỊP TIM) LÀ GÌ?

Rối loạn nhịp tim là tình trạng bất thường của nhịp tim do những khuyết tật ở hệ thống điện sinh học điều khiển nhịp tim. Các triệu chứng điển hình là nhịp tim bị loạn, ngoại tâm thu, mạch đập nhanh (nhịp tim nhanh) hoặc chậm (nhịp tim chậm) bất thường.

MÁY HEM-7361T PHÁT HIỆN RỐI LOẠN NHỊP TIM (IHB) VÀ AFIB NHƯ THẾ NÀO?

Trong bất kỳ chế độ đo huyết áp bằng tay nào, biểu tượng nhịp tim không đều sẽ hiển thị khi máy HEM-7361T phát hiện từ hai nhịp bất thường trở lên trong quá trình đo. Nhịp tim không đều được định nghĩa là một nhịp thấp hơn hoặc cao hơn 25% so với nhịp tim trung bình phát hiện được trong khi máy đo đang đo huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Để sang lọc AFib, hãy kích hoạt chế độ đo huyết áp 3 lần bằng cách nhấn giữ nút khởi động (START).

Máy đo huyết áp HEM-7361T sẽ tự động đo huyết áp 3 lần liên tiếp và hiển thị biểu tượng Afib nếu phát hiện hai lần IHB trở lên. Chức năng chỉ số Afib phát hiện khả năng xảy ra Afib với độ chính xác 94.2% (độ nhạy 95.5% và tính đặc hiệu 93.6%) như đã được thể hiện trong nghiên cứu với phép đo tham chiếu của máy điện tim ECG. Nếu biểu tượng Afib hoặc IHB hiển thị cùng với kết quả đo huyết áp thì chúng tôi khuyến cáo bạn nên gặp bác sĩ để có can thiệp sớm.



AFIB QUA NHỮNG CON SỐ

33.5

triệu người bị ảnh hưởng bởi Afib*

Afib tăng nguy cơ đột quỵ

5x

Cao huyết áp được tìm thấy trong

60%

trường hợp Afib*

Phát hiện sớm Afib giảm nguy cơ đột quỵ

68%

so với không phát hiện*



TRIỆU CHỨNG

Có những triệu chứng nhất định thường xảy ra phổ biến ở Afib.

Hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay khi bạn thấy khó thở, đau ngực hoặc nhận thấy nhịp tim của bạn không đều.

• Một mối

Bạn có thể cảm thấy hết sức mệt mỏi hoặc thiếu sức lực để làm những việc bạn thường làm.

• Chóng mặt hoặc đau đầu nhẹ

Tình trạng này có thể xảy ra đột ngột và bạn có thể cảm thấy đau đầu nhẹ hoặc cảm thấy như cần phòng đang quay tròn.

• Ngất xỉu

Tình trạng này xảy ra khi bạn thấy chao đảo và có thể bất đầu hoặc thực sự "lơ lửng tới sấm" và bất tỉnh.

• Đau thắt ngực

Bạn có thể cảm thấy đau hoặc bị đè nặng trên ngực.

• Khó thở

Bạn có thể thấy khó thở trong khi đang làm những việc bình thường hoặc ngay cả khi ngồi xuống hoặc nghỉ ngơi.

• Đánh trống ngực

(cảm giác tim đập thình thịch)
Đột nhiên có thể cảm nhận nhịp tim rõ ràng hơn. Khi bị Afib, bạn có thể cảm thấy tim bất

đều đập nhanh (tim đập nhanh), đập không đều, hoặc có thể cảm thấy ngực đột nhiên đập thình

thịch, đập yếu và không đều hoặc đập nhanh.

CÁC YẾU TỐ RỦI RO

Có những yếu tố làm tăng nguy cơ Afib. Nếu bạn có hoặc đang trải qua bất kỳ tình trạng nào sau đây, vui lòng kiểm tra thường xuyên để phát hiện Afib để đảm bảo được can thiệp sớm nếu cần thiết.

Các tình trạng này bao gồm:



Đột quỵ



Huyết áp cao



Một mối mạn tính



Không cung cấp đủ máu



Suy tim




Thiếu đường



Các vấn đề về nhịp tim khác

CHẨN ĐOÁN BẰNG CÁCH NÀO?

Có thể phát hiện Afib bằng cách sử dụng thiết bị có chức năng báo Afib như máy đo huyết áp HEM-7361T hoặc bằng cách tự kiểm tra mạch. Tuy nhiên, nên thực hiện chẩn đoán Afib thông qua việc thăm khám và xét nghiệm, thông báo ngay cho bác sĩ nếu bạn gặp các triệu chứng giống như Afib. Việc đánh giá y tế kỹ lưỡng bởi các bác sĩ chuyên khoa tim mạch là rất cần thiết trước khi tiến hành can thiệp hoặc điều trị. Bạn có thể thực hiện các xét nghiệm sau:

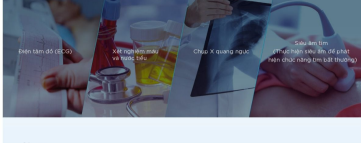

Điện tâm đồ (ECG)

Xét nghiệm máu và nước tiểu

Chụp X quang ngực

Siêu âm tim (Thực hiện siêu âm để phát hiện chức năng tim bất thường)

References

1. H. Kikawa, T. Noma, C. Minamori et al., Multiple measurements with automated blood pressure monitor can detect atrial fibrillation with high sensitivity and specificity in general cardiac patients, ESC Congress 2019

2. Ruff CT, Giugliano RP, Braunholtz E, Hoffman EB, Bernadopoulos N, Ezekowitz MD et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials Lancet 2014; 383:955-962

3. Morillo, Carlos A et al. "Atrial fibrillation: the current epidemic." Journal of internal medicine vol. 261,3 (2007): 218-226 doi:10.1111/j.1365-2796.2007.01841.x

4. NICE. Atrial Fibrillation, 2018. Available at: <https://www.nice.org.uk/condition/atrial-fibrillation/complications/>. Last accessed May 2019.

5. Camm AJ, Sanzari L, Boriani J, et al. Atrial tachycardia, flutter, and fibrillation. In: Sakuma S, Camm AJ, eds. Electrophysiological Disorders of the Heart. Elsevier Churchill Livingstone, 2009:283-303.

6. Gilmartin A, Wong C, Weiss A, Rappoel J, Altman DG et al. (2013) Atrial fibrillation and risks of cardiovascular disease, renal disease, and death: systematic review and meta-analysis BMJ 2013; 346:f2482.

7. Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, Sanzari L, Akin J, Chalkchuan S et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation—developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (European Society of Cardiology) Eur Heart J 2012; 33:1717-1743.

8. Hart RG, Benavente O, McBride R, Pearce LA. Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis. Ann Intern Med 1999; 131:491-502.

9. <https://www.bloodthinner.com/signs-and-symptoms-of-atrial-fibrillation/>

Số công bố 220300054/PCBB-DHT

Có sẵn công bố: SẢN PHẨM ĐẠ ĐIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà văn phòng Tổng công ty TSB, số 74 Hoàng Diệu Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Chăm sóc tại nhà	Chuyên nghiệp	Sự kiện / Khuyến mãi	Giá trị	Hỗ trợ
Tìm kiếm Best Zero Theo dõi huyết áp Tỷ lệ hồi phục Số nhịp độ Quản lý cơn nặng Tỷ lệ giảm đau	Theo dõi huyết áp Tỷ lệ hồi phục Đo nhịp độ Sống lạc không cần đến	Tiêu chuẩn Chứng trình khuyến mãi Cần nâng sản phẩm	Chính sách chứng từ Ngôi nhà Công nghệ Nhà máy Phân xưởng	Đang kỳ bản hành Hàng hóa sử dụng Giá trị thương giá Địa điểm mua hàng Chăm sóc khách hàng Chiến lược bảo vệ Điều khoản sử dụng



Kết nối với chúng tôi



AFIB

connect

Máy Đo Huyết Áp Tự Động HEM-7361T

★★★★★ Overall rating : 5/5 | 8 Đánh giá

Omron HEM-7361T đo và phát hiện huyết áp và rung tâm nhĩ(AFIB) cùng một lúc. Kiểm tra kép cho 2 người dùng giúp người dùng kiểm tra toàn diện về nguy cơ đột quỵ với một thiết bị, trong một lần đo. Được thiết kế dành cho gia đình, chức năng 2 người dùng cho phép lưu trữ và truyền dữ liệu kết quả đo của 2 người dùng riêng biệt sang điện thoại thông minh của họ.

2.950.000 VND*

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế.

- Thông tin tổng quan

Điểm nổi bật của sản phẩm

AFib là gì?

Sử dụng như thế nào?

Kết nối OMRON

Phụ kiện tùy chọn

- Hỗ trợ

Đánh giá

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY ĐO HUYẾT ÁP OMRON HEM-7361T

BƯỚC 1

Chuẩn bị đo

30 phút trước khi

5 phút trước khi

Uống rượu

Hút thuốc

Tắm

Uống cafe

Ăn

Tập thể dục

Nghỉ ngơi & thư giãn

BƯỚC 2

(i) Tải xuống ứng dụng OMRON Connect

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

omron connect

(ii) Kết nối với thiết bị thông minh

1. Bật Bluetooth

2. Mở ứng dụng OMRON Connect

3. Xem hướng dẫn hiển thị trên màn hình

Ngày và giờ sẽ được tự động cài đặt khi kết nối máy với ứng dụng

BƯỚC 3

(i) Quấn vòng bít lên cánh tay trái

A. Đảm bảo mép vòng bít cách 1-2cm phía trên khuỷu tay.
B. Đảm bảo đặt ống dẫn khí ở bên trong cánh tay của bạn và quấn vòng bít chắc chắn để không bị tuột

(ii) Ngồi đúng tư thế

A. Ngồi dựa lưng và đặt cánh tay lên bàn
B. Quấn vòng bít trên cánh tay sao cho ngang với tim
C. Để thẳng bàn chân, không vắt chéo chân, giữ nguyên tư thế và không nói chuyện trong khi đo

1. Click

2. Quấn vòng bít

3. Khoảng cách 1-2 cm

4. Đặt ống dẫn khí

A. Ngồi dựa lưng

B. Quấn vòng bít ngang với tim

C. Bàn chân thẳng

(iii) Chọn ID người dùng (1 or 2)



BƯỚC 4

Lựa chọn 1 - Không có màn hình AFIB

A. Nhấn nút Start/Stop để đo và lưu kết quả đo tự động
B. Mở ứng dụng để chuyển kết quả đo

Thực hiện đo

A. Nhấn nút Start/Stop

0.00

78

138

86

70

140

88

72

138

86

70

B. Mở ứng dụng

Lựa chọn 2 - Chế độ AFIB

A. Nhấn nút Start trong vòng 3 giây để kích hoạt tính năng AFib
B. Máy đo huyết áp sẽ tự động thực hiện 3 lần đo liên tiếp trong khoảng thời gian 30 giây và hiển thị kết quả trung bình

Thực hiện đo ở chế độ AFIB

A. Nhấn nút Start

0.00

78

138

86

70

140

88

72

138

86

70

B. Kết quả trung bình

138

86

70

BƯỚC 5

(i) Kiểm tra kết quả đo ở chế độ so sánh



(ii) Sử dụng chức năng bộ nhớ

A. Chọn ID người dùng
B. Nhấn nút bộ nhớ - có thể lưu tối đa 100 kết quả đo

A. Chọn ID người dùng

138

86

70

B. Nhấn nút bộ nhớ

138

86

70

BƯỚC 6

Xem kết quả trên ứng dụng OMRON Connect hiển thị rõ ràng giao diện người dùng khi phát hiện AFIB





Mục đích sử dụng

Thiết bị này là máy đo kỹ thuật số dùng để đo huyết áp và nhịp tim của người lớn. Thiết bị phát hiện sự bất thường của nhịp tim trong quá trình đo và đưa ra các tín hiệu cảnh báo cùng với kết quả đo. Được thiết kế để sử dụng trong gia đình.

Thiết bị này có thể phát hiện rung tâm nhĩ bất thường (AFib). Lưu ý, thiết bị này không dùng để chẩn đoán AFib. AFib chỉ có thể được phát hiện bằng điện tâm đồ (ECG). Nếu xuất hiện triệu chứng AFib, tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Số công bố 220000794/PCBB-BYT

Công ty công bố: VÂN PHƯƠNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà văn phòng Tổng công ty 788, số 707 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Chăm sóc tại nhà

Tần nhân Den Zero
Theo dõi huyết áp
Trị liệu hô hấp
Đo nhiệt độ
Quản lý cân nặng
Trị liệu giảm đau

Chuyên nghiệp

Theo dõi huyết áp
Trị liệu hô hấp
Đo nhiệt độ
Sàng lọc Màng xen lãn

Sự kiện / Khuyến mãi

Thông báo
Chương trình khuyến mãi
Cầm nang sức khỏe

Giải thiệu

Dịch vụ của chúng tôi
Nghề nghiệp
Công nghệ
Nhà máy
Môi trường

Hỗ trợ

Đăng ký bảo hành
Hướng dẫn sử dụng
Câu hỏi thường gặp
Địa điểm mua hàng
Chăm sóc khách hàng
Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng

Kết nối với chúng tôi



Số 65 trang web | Bản quyền năm 2022 thuộc về Omron Healthcare Asia. Bảo lưu mọi quyền.



Máy Đo Huyết Áp Tự Động HEM-7361T

★★★★★ Overall rating : 5/5 | 8 Đánh giá

Omron HEM-7361T đo và phát hiện huyết áp và rung tâm nhĩ (AFIB) cùng một lúc. Kiểm tra kép cho 2 người dùng giúp người dùng kiểm tra toàn diện về nguy cơ đột quỵ với một thiết bị, trong một lần đo. Được thiết kế dành cho gia đình, chức năng 2 người dùng cho phép lưu trữ và truyền dữ liệu kết quả đo của 2 người dùng riêng biệt sang điện thoại thông minh của họ.

2.950.000 VND*

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế.

- Thông tin tổng quan
- Điểm nổi bật của sản phẩm
- Afib là gì?
- Sử dụng như thế nào?
- Kết nối OMRON

Phụ kiện tùy chọn

Hỗ trợ

Đánh giá



OMRON connect

ĐO ĐỒNG BỘ KHÔNG CẦN DÂY VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐỂ DỄ DÀNG XEM, LƯU VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU SỨC KHỎE CỦA BẠN




CÀI ĐẶT DỄ DÀNG

CHUYỂN DỮ LIỆU BƠ TỪ MÁY SANG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐỂ DỄ DÀNG VỚI HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐƠN GIẢN



TRUY CẬP BẤT KỲ LÚC NÀO

HOẠT ĐỘNG CUỐI CÙNG VÀ LỊCH SỬ SỨC KHỎE CỦA NHÂN BẠN LUÔN Ở ĐẦU NGÓN TAY BẠN THÔNG QUA BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRỰC QUAN

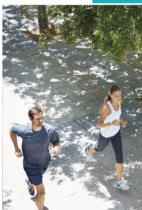

XEM QUÁ TRÌNH

DỮ LIỆU SỨC KHỎE CỦA BẠN ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN BIỂU ĐỒ RÕ RÀNG VÀ DỄ HIỂU GIÚP BẠN CÓ THỂ XEM ĐƯỢC XU HƯỚNG SỨC KHỎE CỦA CHÍNH BẠN

Xem danh sách các thiết bị thông minh được hỗ trợ trước khi mua

Kết nối đơn giản

Quá trình thiết lập dễ dàng để truyền dữ liệu tự động.

Truy cập bất cứ lúc nào

Hoạt động mỗi nhất và lịch sử cá nhân của bạn luôn trong tầm tay với dữ liệu sức khỏe của bạn được lưu trữ an toàn trên điện thoại thông minh của bạn.

Kết quả rõ ràng và chi tiết

Xu hướng tại chỗ và theo dõi sức khỏe của bạn theo thời gian.

Bảng điều khiển trực quan

Xem các phép đo gần đây trên bảng điều khiển và nhận được lời nhắc trực quan để đo thường xuyên.

Theo dõi sức khỏe của bạn

Xem sức khỏe của bạn đã thay đổi theo thời gian như thế nào với các biểu đồ và đồ thị rõ ràng.




Truy cập dữ liệu sức khỏe của bạn bất cứ lúc nào

Màu sáng của màn hình trên trang chủ: nhắc nhở người dùng đo thường xuyên



Có được thông tin chi tiết, rõ ràng và trực quan

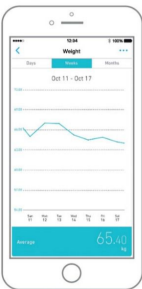

Theo dõi tiến trình và xu hướng sức khỏe của bạn



Cải thiện sức khỏe của bạn bằng cách quản lý lối sống tốt hơn thông qua Nhật ký huyết áp *

Định dạng biểu đồ chính xác tại thời điểm in và có thể thay đổi khi nâng cấp ứng dụng

Số công bố 220000154/PCBB-BYT

Cơ sở công bố: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Chăm sóc tại nhà	Chuyên nghiệp	Sự kiện / Khuyến mãi	Giới thiệu	Hỗ trợ
Tắm nhen Gen Zero Theo dõi huyết áp Trị liệu hô hấp Đo nhiệt độ Quản lý cân nặng Trị liệu giảm đau	Theo dõi huyết áp Trị liệu hô hấp Đo nhiệt độ Sàng lọc không xâm lấn	Thông báo Chương trình khuyến mãi Cầm nang sức khỏe	Dịch vụ của chúng tôi Nghề nghiệp Công nghệ Nhà máy Môi trường	Đăng ký bảo hành Hướng dẫn sử dụng Câu hỏi thường gặp Địa điểm mua hàng Chăm sóc khách hàng Chính sách bảo mật Điều khoản sử dụng
Kết nối với chúng tôi				