



Xác định chính xác 99% thời điểm rụng trứng



Độ nhạy gấp 2 lần so với que thường



Hỗ trợ 24/7



Hướng dẫn sử dụng nhanh

1



Mở túi đựng que thử

2



Tháo nắp que thử. Làm ướt đầu que thử bằng cách tiểu trực tiếp vào đầu que thử, hoặc nhúng phần đầu que thử vào cốc đựng nước tiểu trong 15s


3



5 - 10 phút


Đợi 5-10 phút

4

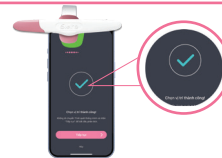


Kết nối que thử với ứng dụng Eveline Care đã được cài đặt trên điện thoại thông qua kẹp kết nối


Đọc kết quả

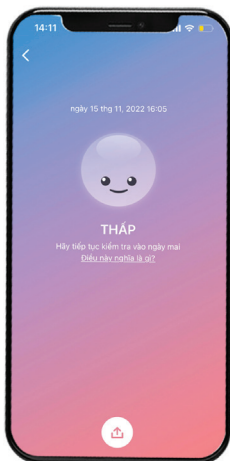

Chưa đến hoặc đã qua thời điểm rụng trứng

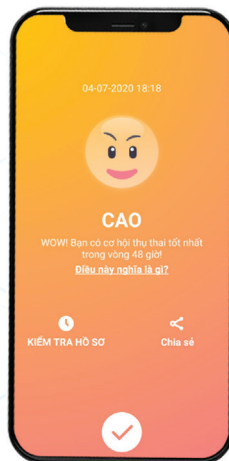

Sắp tới thời điểm rụng trứng

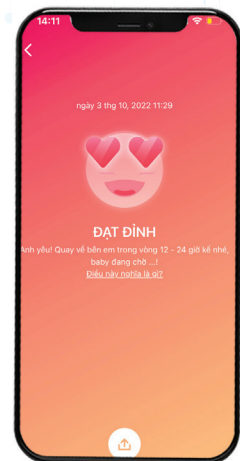

Rất gần thời điểm rụng trứng

Số công bố: 220000850/PCBB-HN

Nhà sản xuất: IXENSOR CO., LTD, Đài Loan

Nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH Công nghệ Y Tế TMSC Việt Nam

Địa chỉ: Số 9, ngõ 40, phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Email: Support@tm-sc-vn.com

Điện thoại: 096.990.2992

Website: www.tm-sc-vn.com