



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG VẾT THƯƠNG VÀ VẾT NẤM TRÊN DA

“Dung dịch khử trùng vết thương và vết nấm trên da” của Sanodyna là dung dịch được sản xuất theo công nghệ hiện đại ECA - Italia, có chứa hàm lượng Acid hipoclorơ siêu tinh khiết giúp tiêu diệt hơn 99.99% các loại vi khuẩn, bào tử nấm, và các tác nhân gây bệnh trên mọi bề mặt. Cơ chế diệt khuẩn của Sanodyna tương tự các tế bào bạch cầu tự nhiên sản sinh ra axit HOCl để bảo vệ chống lại bệnh, vi khuẩn gây ra trong cơ thể người.

Thành phần: Nước mềm (H₂O), Muối tinh (NaCl), HOCl. Công nghệ ECA tạo ra sản phẩm HOCL có tính năng diệt khuẩn mạnh, an toàn với mọi môi trường.

Công dụng:

- Sát khuẩn vết thương hở, vết mổ, vết loét, vết viêm nhiễm và vết nấm trên da;
- Sát khuẩn vết mụn mủ, mụn viêm trên da, vết bỏng và vết côn trùng cắn;
- Chăm sóc vết thương sau phẫu thuật;
- Sát khuẩn bên trong khoang miệng, hỗ trợ khử mùi hôi khoang miệng.

Lợi ích:

Sanodyna giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn xâm lấn vào vết thương, giúp bảo vệ vết thương và thúc đẩy nhanh quá trình lành vết thương, vết nấm. Không làm tổn thương mô vết thương. Không gây độc cho cơ thể khi sử dụng vì sản phẩm 100% tự nhiên, an toàn với mọi môi trường.

Hướng dẫn sử dụng:

- Đổ trực tiếp một lượng dung dịch vừa đủ vào khu vực cần sát khuẩn rồi để khô tự nhiên.
- Súc miệng bằng Sanodyna với nước theo tỷ lệ 1/10 để khử mùi, làm sạch khoang miệng, sử dụng 2-3 lần/ngày.

Cảnh báo:

- Không sử dụng chung với các chất diệt khuẩn khác như cồn, cloramin, etc.

Bảo quản:

- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tên cơ sở sản xuất và phân phối: **CÔNG TY TNHH SANODYNA VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 22, Dãy Chi Cục Thuế, Tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Số công bố: 230000160/PCBB-HN

TCCS: 02:2022/SVN

Mẹo sử dụng SANODYNA

“Dung dịch khử trùng vết thương và vết nấm trên da” của Sanodyna là dung dịch được sản xuất theo công nghệ hiện đại ECA - Italia, có chứa hàm lượng Acid hipoclorơ siêu tinh khiết giúp tiêu diệt hơn 99.99% các loại vi khuẩn, bào tử nấm, và các tác nhân gây bệnh trên mọi bề mặt. Cơ chế diệt khuẩn của Sanodyna tương tự các tế bào bạch cầu tự nhiên sản sinh ra axit HOCl để bảo vệ chống lại bệnh, vi khuẩn gây ra trong cơ thể người.

Here are five tips you can do with Sanodyna

01

SÁT KHUẨN VẾT THƯƠNG

Đổ trực tiếp một lượng dung dịch vừa đủ vào khu vực cần sát khuẩn rồi để khô tự nhiên.



02



NẤM TRÊN DA

Sanodyna giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn xâm lấn vào vết thương, giúp bảo vệ vết thương và thúc đẩy nhanh quá trình lành vết thương, vết nấm. Không làm tổn thương mô vết thương. Không gây độc cho cơ thể khi sử dụng vì sản phẩm 100% tự nhiên, an toàn với mọi môi trường.

03

SÁT KHUẨN MIỆNG

Súc miệng bằng Sanodyna với nước theo tỷ lệ 1/10 để khử mùi, làm sạch khoang miệng, sử dụng 2-3 lần/ngày.

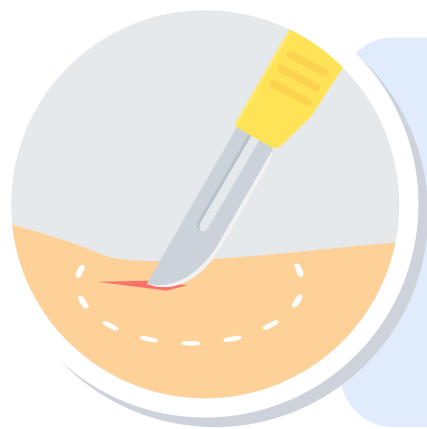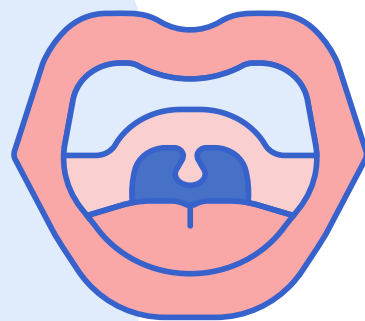

04

SÁT KHUẨN SAU PHẪU THUẬT

Sát khuẩn vết thương hở, vết mổ, vết loét, vết viêm nhiễm và vết nấm trên da.

05

SÁT KHUẨN VẾT MỤN

Sát khuẩn vết mụn mủ, mụn viêm trên da, vết bỏng và vết côn trùng cắn.

