



# Khẩu Trang Y Tế 10 cái

## Medical Face Mask



3 lớp  
kháng khuẩn



Lọc khuẩn  
trên 99%



Nguyên liệu  
chất lượng

- Khẩu trang 3 lớp kháng khuẩn.
- Hiệu quả lọc khuẩn trên 99%.
- Nguyên liệu: Chống dị ứng, chất lượng cao.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Dùng tay cầm vào hai dây và đeo vào tai. Không nên để tay chạm vào mặt trong khẩu trang.
- Cố định thanh ngang mũi sát với sống mũi.
- Điều chỉnh nếp gấp xuống phù hợp với khuôn mặt che kín mũi, miệng và cằm.

### LƯU Ý:

- Mặt màu trắng mịn là mặt trong tiếp xúc với da mặt. Mặt còn lại là mặt hướng quay ra ngoài.
- Khi tháo khẩu trang ra, dùng tay tháo dây đeo xuống. Không chạm tay vào bề mặt khẩu trang.
- Không sử dụng khi sản phẩm bị đổi màu.
- Không sử dụng sản phẩm với mục đích khác.
- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.

**QUY CÁCH:** 10 cái/túi.

**LỖ/NSX/HSD:** Xem trên bao bì.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, thoáng mát

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLD CO**

Địa chỉ: 279/32 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản xuất bởi: **CÔNG TY TNHH CSMEDI**

Địa chỉ: Lô i13 Đường số 4, KCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Phân phối bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY**

248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**ĐT:** (+84) 28 7300 3350 - ☎ 1800 6821

**Web:** www.pharmacy.vn

**SỐ PTN:** 200000602/PCBA-HCM

ISO 13485:2016

**SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM**