



# Dung Dịch Vệ Sinh Mũi D'FANCE Nose Hygiene Spray

## Hỗ trợ:

- Vệ sinh mũi hằng ngày
- Dưỡng ẩm mũi
- Giúp mũi thông thoáng và dễ thở

## THÀNH PHẦN:

Được tinh chiết từ muối biển tự nhiên, chứa nhiều muối và khoáng chất như Cu<sup>++</sup>, Zn<sup>++</sup>.

## CÔNG DỤNG:

- Loại bỏ gỉ mũi, chất nhầy từ sâu trong hốc mũi, làm thông thoáng mũi.
- Giúp dễ thở, tạo hơi thở thơm mát, phòng tránh và hỗ trợ làm giảm các triệu chứng viêm mũi họng, cảm cúm và các dạng viêm mũi khác.

## CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Xịt 3 - 5 lần mỗi bên mũi.
- Lặp lại 3 - 6 lần mỗi ngày. Hoặc sử dụng thêm khi cần thiết.
- An toàn khi sử dụng lâu dài.
- Phù hợp cho trẻ em trên 3 tuổi và có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

## LƯU Ý:

Khoảng 4 đến 5 lần xịt đầu tiên, sản phẩm có thể sẽ không ra dung dịch, sau các lần xịt đầu tiên này, vòi xịt sẽ hoạt động bình thường.

## BẢO QUẢN:

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Tránh mùi mạnh và để cạnh các hóa chất khác.
- Sau mỗi lần sử dụng, rửa sạch đầu vòi xịt với nước nóng và lau khô.
- Không tái sử dụng chai xịt, đầu xịt dưới mọi hình thức.

## CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

Không được tiêm. Không sử dụng ngoài mục đích ghi trên nhãn.

**THỂ TÍCH THỰC:** 80 ml

**LÔ SX/NSX:** Xem trên bao bì.

**HD:** 2 năm kể từ NSX.

Tên cơ sở công bố: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE**

Địa chỉ: Km 14, Quốc lộ 1A, Đường Ngọc Hồi, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE**

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Km 14, Quốc lộ 1A, Đường Ngọc Hồi, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ELAPHE**

Địa chỉ chủ sở hữu: Km 14, quốc lộ 1A, Đường Ngọc Hồi, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

**SỐ LƯU HÀNH:** 210000587/PCBA-HN. **TIÊU CHUẨN:** TCCS

**TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ÁP DỤNG:** ISO 13485:2016

**SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM**