

Que thử xét nghiệm định tính hCG

Pharmacy Pregnancy Test

Que thử thai nhanh

- Dễ dàng sử dụng
- Chính xác
- Cho kết quả từ 5 - 10 phút



Nhanh chóng - Đơn giản - Chính xác
Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp 7 đến 10 ngày

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử phát hiện thai sớm) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dòng chảy một chiều dùng để định tính phát hiện hCG trong nước tiểu, hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán thai sớm cho phụ nữ.

TIỀN HÀNH THỬ:

- Lấy nước tiểu vào buổi sáng ngay khi thức dậy (lúc đó hCG là hoóc mone giúp phát hiện thai có nồng độ cao nhất).
- Lấy que thử ra khỏi túi, phải dùng ngay trong vòng 10 phút (mỗi que thử chỉ sử dụng một lần).
- Những que thử vào cốc nước tiểu theo chiều mũi tên, sao cho mặt nước tiểu không ngập quá đầu mũi tên in trên que thử. Sau 10 đến 15 giây, lấy que thử đặt nằm ngang trên mặt phẳng khô, sạch. Đọc kết quả sau 5 phút và trước 10 phút.

ĐỌC KẾT QUẢ:

- **Đã có thai:** Trên que thử xuất hiện 2 vạch ngang màu hồng.
- **Không có thai:** Trên que thử xuất hiện 1 vạch ngang màu hồng.

- **Không đạt:** Trên que thử không xuất hiện vạch ngang màu hồng nào (do thao tác thử sai, mẫu nước tiểu không đạt hoặc bảo quản không đúng). Nên thử lại bằng que thử mới.

LƯU Ý:

- Đọc kỹ tờ Hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm trước khi sử dụng.
- Một số ít trường hợp cho kết quả có thai giả do người thử đang dùng các loại thuốc an thần, lợi tiểu, kháng co giật, thuốc có chứa hCG hoặc người (chiếm tỷ lệ nhỏ) có nồng độ hCG cao hơn bình thường....
- Để xa tầm tay trẻ em.

BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nhiệt độ 4 - 30°C, tránh ánh nắng.

SỐ LƯU HÀNH: 220003688/PCBB-HCM.


ĐÚNG

Đầu mũi tên trên mặt nước tiểu



SAI

Đầu mũi tên dưới mặt nước tiểu

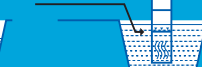

CÓ THAI



KHÔNG CÓ THAI



KHÔNG ĐẠT