
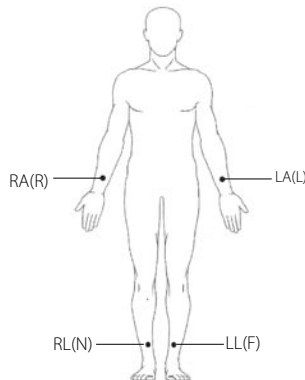


BeneHeart R3/BeneHeart R3A Electrocardiograph Hướng dẫn nhanh

Vị trí đặt điện cực

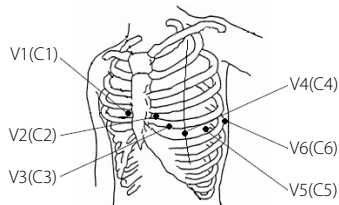

Công việc chuẩn bị

- Chuẩn bị da tại vị trí đặt điện cực
 - Để da lộ ra ngoài tại vị trí đặt điện cực
 - Cạo sạch lông tại vị trí đặt điện cực
 - Làm sạch mỗi vị trí đặt điện cực bằng cồn hoặc mài nhẹ bằng miếng gạc khô để loại bỏ da chết. Làm da thật khô ráo.
- Đặt điện cực
 - Lần lượt kết nối 6 dây dẫn tại ngực và 4 dây dẫn tại các chi với các điện cực
 - Nếu dùng điện cực tái sử dụng, bôi một lớp gel dẫn điện mỏng lên mỗi vị trí đặt điện cực và từng điện cực kim loại.
 - Gắn điện cực, tham khảo hình bên trái cho các vị trí gắn điện cực.

AHA	IEC	Vị trí đặt điện cực
V1	C1	Liên sườn 4, cạnh Phải xương ức
V2	C2	Liên sườn 4, cạnh Trái xương ức
V3	C3	Giữa vị trí điện cực V2 (C2) and V4 (C4)
V4	C4	Giao điểm của đường trung đòn trái với liên sườn 5
V5	C5	Giao điểm của đường nách trước trái với đường ngang đi qua V4
V6	C6	Giao điểm của đường nách giữa trái với đường ngang đi qua V4
RA	R	Trên cổ tay phải
LA	L	Trên cổ tay trái
RL	N	Trên cổ chân phải
LL	F	Trên cổ chân trái

Đề phòng

- ❑ Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho các đơn vị phẫu thuật tần số cao.
- ❑ Đối với những bệnh nhân dùng máy tạo nhịp, thiết bị này có thể nhiễu với máy tạo nhịp tại phức bộ QRS nếu một số điều kiện bất lợi tồn tại đồng thời. Luôn theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân này.
- ❑ Điện cực tái sử dụng phải được làm sạch sau mỗi lần sử dụng.
- ❑ Khi đặt điện cực lên ngực, đảm bảo rằng các điện cực kim loại không chạm vào nhau và gel dẫn điện tại vị trí này không dính với vị trí kia.

Vận hành cơ bản

Kết nối cáp bệnh nhân

Cắm cáp bệnh nhân vào vị trí kết nối cáp bệnh nhân ở mặt bên phải của máy. Vận các vít để gắn chắc chắn cáp bệnh nhân vào thiết bị.

Bật thiết bị

Nhấn nút  để bật máy

Nhập thông tin bệnh nhân

Nhấn nút [ID], [Age] và [Gender] để nhập thông tin bệnh nhân lần lượt là số ID, tuổi, và giới tính

Thu tín hiệu ECG

- ◆ Nhấn nút [ECG] để bắt đầu đo và ghi tự động.
- ◆ Nhấn nút [Manual] để bắt đầu đo và ghi thủ công
- ◆ Nhấn nút [Rhythm] để bắt đầu đo và ghi nhịp



046-004653-00(2.0)

Cài đặt hệ thống

Nhấn nút [Menu] để đến menu chính. Cấu hình các cài đặt như mong muốn

Quản lý kho lưu trữ bệnh nhân

- Ở màn hình bình thường, nhấn F4 để vào màn hình danh mục để xóa hoặc xuất dữ liệu bệnh nhân
- Chọn [Menu] → [File Management] → [Search by Date] or [Search by ID] để tìm dữ liệu bệnh nhân.